



# DENSITY

IDENTITY WITH CONFIDENCE



Jeisys

# ¿Por qué DENSITY?

## Tecnología de Energía de RF Secuencial Patentada

- Algoritmo único en su tipo que combina RF monopolar y bipolar en un solo disparo.
- Resultados inmediatos y duraderos con un solo tratamiento.
- Sin tiempo de inactividad.

## Ajuste Automático de Impedancia en Tiempo Real (RIC)

Sistema de calibración continua de impedancia de la piel (RIC, por sus siglas en inglés), una tecnología exclusiva de Jeisys que asegura una entrega uniforme y personalizada de energía RF, garantizando máxima seguridad y eficacia terapéutica.

## Sistema de Enfriamiento Controlado y Ajustable (SAC)

Sistema de enfriamiento (SAC por sus siglas en Inglés) con 5 niveles y 3 etapas con 9 modos de pulso que garantizan un calentamiento volumétrico eficaz, manteniendo el máximo confort del paciente.

## Operación Intuitiva y Eficiente


- Pantalla táctil de 15" con interfaz gráfica amigable.
- Modo de pulsos automáticos para una aplicación fluida.
- Soporte magnético para la pieza de mano y gancho para el cable.
- Amplio espacio de almacenamiento para puntas, gel conductor y gas criogénico.



# Tecnología de Calentamiento Secuencial Patentada

Mejoras a largo plazo con:

## RF Monopolar

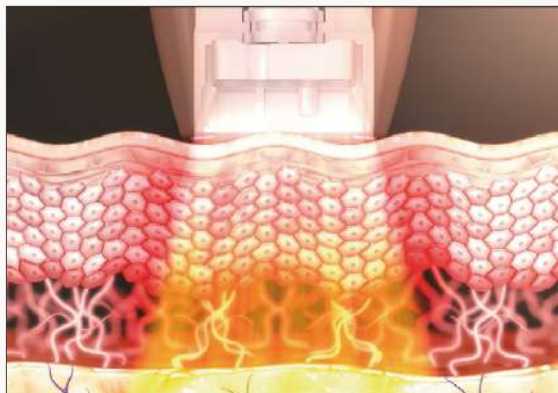


Capa papilar  
Capa reticular

- Mejora continua durante 4-6 meses, con resultados que duran hasta 12 meses.
- Calentamiento volumétrico de la dermis profunda, grasa, septos fibrosos y fascia profunda.
- Refuerza los ligamentos de soporte.
- Efecto tensor y de lifting para definición mandibular.

Efecto inmediato con:

## RF Bipolar

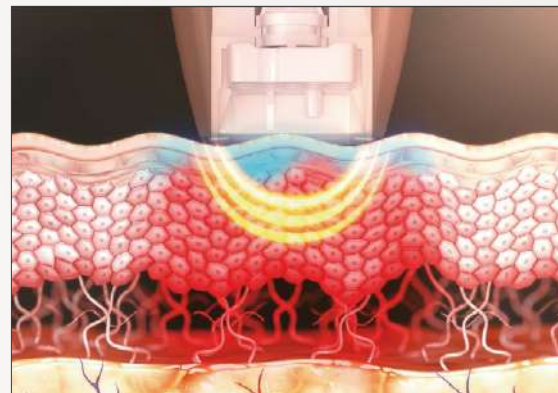

Capa papilar  
Capa reticular

- Resultado visible inmediato tras el tratamiento, con duración de al menos 1 mes.
- Calentamiento y estimulación dentro de las capas papilar y reticular.
- Mayor elasticidad cutánea.
- Reafirmación y mejora de líneas finas.
- Remodelación rápida del colágeno.

## Resultados Inigualables con Evidencia Clínica

La capacidad única de Density Noir de emitir secuencialmente RF monopolar y bipolar proporciona resultados inmediatos que antes no se lograban con RF solo monopolar. El nivel de enfriamiento ajustable maximiza la comodidad y seguridad del paciente, y el profesional puede realizar el tratamiento fácilmente gracias al modo de pulsos automáticos, sin necesidad de presionar botones o usar pedal.



**76%**

más densidad de fibras de colágeno

**82%**

más densidad de fibras de elastina

**239%**

más de mejora en el colágeno recién sintetizado

*\*según datos publicados*


# Resultados de pacientes reales



*Antes*



*Inmediatamente después*

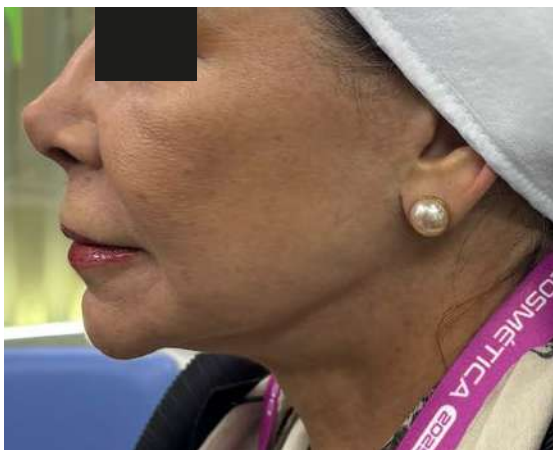


*Antes*



*Inmediatamente después*



*Antes*

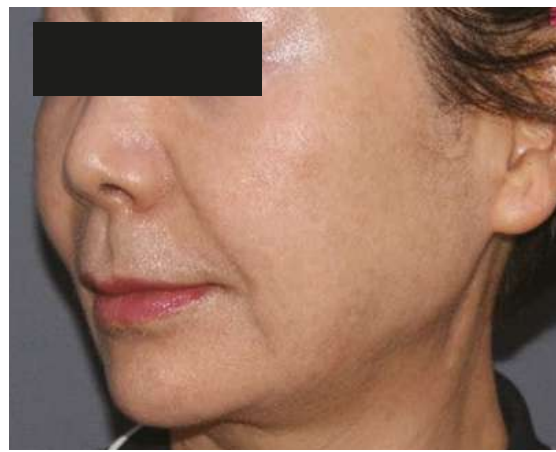

*4 semanas después*



*Antes*



*Inmediatamente después*



*4 semanas después*



*Antes*



*6 semanas después*



*Antes*



*6 semanas después*

# Pieza de mano y puntas

El aplicador Density Noir, con su avanzada pantalla LED y panel de control, garantiza una experiencia fluida y personalizada, combinando comodidad con tecnología de vanguardia para un rendimiento óptimo.



## Control de la pieza de mano

**T:** Tratamiento  
**S:** Modo Espera  
Ajuste de energía

## Pantalla LED

Temperatura de la piel en tiempo real  
Conteo de pulsos  
Progreso de pulsos

## Botón de pulso

Disponible para el modo manual

## Punta de tratamiento

3 opciones disponibles  
sin time-lock



## Punta para ojos

600 disparos  
 $0.5 \times 0.5 \text{ cm} = 0.25 \text{ cm}^2$



## Punta para el rostro

1000 disparos  
 $2 \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$



## Punta para el cuerpo

600 disparos  
 $5 \times 3.2 \text{ cm} = 16 \text{ cm}^2$

# Interfaz de Usuario Amigable

Intuitiva y fácil de usar

- A** Nivel de tratamiento ajustable del 0 al 8, en incrementos de 0.5
- B** Selección de modo automático o manual
- C** Alarma para recordatorio del límite de disparos
- D** Contador de vida útil de la punta
- E** Energía total entregada (kJ) y energía por pulso (J)
- F** Información de la punta conectada actualmente
- G** Mensajes de tratamiento y del dispositivo





# DENSITY

## Especificaciones:

Nombre del modelo:	Density Noir
Frecuencia del RF:	6.78 MHz
Potencia máxima:	400W
Dimensiones (mm):	1373.2 (A) x 521.0 (L) x 624.2 (P)
Peso:	52 Kg
Frecuencia de repetición:	1 Hz - 3 Hz
Sistema de enfriamiento:	Gas Criogénico de 5 niveles

Density cuenta con aprobación de la FDA (EE.UU.) y MFDS (Corea), con tecnología patentada a nivel global. Está diseñado para ofrecer la mejor experiencia de tratamiento sin comprometer los resultados terapéuticos.

Jeisys ha liderado la evolución de la radiofrecuencia durante décadas con productos únicos, ofreciendo al mismo tiempo uno de los retornos de inversión más competitivos del mercado. Por favor contacta a tu representante local de Density para más detalles.

**Patente No. KR 10-2540900**



Distribuidor exclusivo  
contacto@medestore.net  
Carr. a los Arquitos 603 Jesús María, Ags. C.P. 20996

📞 449 1732054

📞 449 4782400