

Hydra touch *H2*

Programa de entrenamiento



Programa de entrenamiento Hydratouch H2

Información general

Queremos agradecer el haber adquirido su nuevo equipo de Hydratouch H2.

Su tecnología es de Hidra-dermoabrasión. Hydratouch H2 está especialmente diseñado para los tratamientos de rejuvenecimiento facial, hidratación de la piel y exfoliación facial, único con aplicación de Hidrogeno para contrarrestar el envejecimiento por oxidación celular.

Además cuenta con la tecnología de Electroporación para penetración de productos y la tecnología de Baja Frecuencia para efecto lifting.

Objetivos del programa

- Presentar un programa de entrenamiento teórico y práctico, para el uso y aprovechamiento adecuado de su equipo Hydratouch H2.
- Dar a conocer a los participantes la funciones, ventajas, alcances, limitaciones del equipo.

Conocimientos que obtendrán los participantes

- Será capaz de programar el equipo para los diferentes tratamientos y condiciones del paciente.
- Será capaz de analizar y valorar la condición actual de los probables pacientes, y si es que son candidatos para llevar a cabo alguno de los tratamientos con Hydratouch H2.
- Será capaz de informar al paciente sobre los resultados y alcances que pueda ofrecer al someterse a cualquiera de los tratamientos de Hydratouch H2.
- Conocerá los posibles riesgos y contraindicaciones en el tratamiento con Hydratouch H2.

Conocimientos previos requeridos

Para el máximo aprovechamiento de su entrenamiento, es necesario cuente con los siguientes conocimientos:

- Anatomía de la piel.

Para el mejor aprovechamiento del entrenamiento

Considere que usted ha hecho una gran inversión para la adquisición de su nuevo equipo Hydratouch H2, además que su paciente espera que usted le ofrezca los mejores resultados posibles con el mismo, por lo cual es importante que tome en cuenta las siguientes consideraciones para el presente programa de entrenamiento.

- El entrenamiento se lleva a cabo durante un día, aproximadamente de cinco a seis horas, por lo que es recomendable durante ese día el personal que vaya a ser entrenado no tenga citas durante ese tiempo.
- Parte del éxito del entrenamiento es que el personal que estará encargado del uso del equipo haya analizado detenidamente la información en el manual de usuario y todos los documentos entregados previos a la capacitación.
- Es muy importante contar con los pacientes requeridos para la práctica, de otra manera no será posible completar los conocimientos obtenidos en la sesión teórica.

Sesión teórica

10 minutos	Aclaración de preguntas sobre el manual de usuario y protocolo.
20 minutos	Teoría de acción de Hydratouch H2. <ul style="list-style-type: none">• Tecnología de Hidra-dermoabrasión.• Tecnología de electroporación.• Tecnología de Baja Frecuencia.• Indicaciones y contraindicaciones.• Selección de pacientes.• Preparación del paciente.• Cuidados de pacientes post tratamiento.• Seguimiento del paciente. <ul style="list-style-type: none">• Atención a preguntas.

Sesión práctica

Es muy importante que el paciente haya asistido a una valoración previa y llenado su consentimiento informado. Las siguientes se consideran contraindicaciones para el tratamiento, si el candidato presente alguna de las siguientes condiciones, no podrá ser tratado.

- Cáncer.
- Mujeres embarazadas o lactantes.
- Herpes.
- Pacientes con enfermedad cardíaca o persona con un marcapasos cardíaco.
- Epiléptico.
- Lupus.
- Infección, erupción.
- Inflamación.
- Capilares dilatados o venas varicosas.
- Tratamiento anticoagulante o enfermedad de la sangre o cardiopatía.
- Hinchazón de las glándulas.
- Anafilaxia hereditaria.
- Enfermedad de tiroides.
- Y otras enfermedades específicas.

Desarrollo: Se llevará a cabo un tratamiento de muestra por la persona encargada del entrenamiento. El resto de los tratamientos serán realizados por los asistentes, supervisados por la persona encargada.

20 minutos	Introducción del equipo. <ul style="list-style-type: none">• Estructura:<ul style="list-style-type: none">○ Pantalla.○ Pieza de mano Aqua y su soporte.○ Piezas de mano de Electroporación y Baja Frecuencia.○ Regulador de flujo y regulador de succión.○ Contenedor de desperdicios.○ Botellas para soluciones y para agua H2.○ Interruptor de encendido.• Conexión del cable de alimentación.• Conexión y desconexión de las piezas de mano.• Instalación de las botellas de soluciones y botella de agua H2.• Limpieza de filtros en botellas.• Colocación correcta y lavado de depósito de desperdicios.• Cómo encender y apagar su equipo.• Puntas y cubierta de pieza de mano Aqua.
20 minutos	Uso de la interfaz de usuario: <ul style="list-style-type: none">• Selección de las diferentes piezas de mano: Aqua Peeling, Electroporación, Baja frecuencia.• Selección de Soluciones Aqua (1-3).• Selección de modo Hidrogeno.• Selección del modo de limpieza.• Tiempo de tratamiento.• Configuración del nivel de succión.• Alarma de desperdicios.• Inicio y detener el tratamiento.

10 minutos	<p>Preparación del paciente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El paciente debe de estar rasurado en la cara. • Limpieza facial. <p>Se requiere alguno de los pacientes que vayan a ser tratados.</p>
30 minutos	<p>Tratamiento 1: Tratamiento completo: Hidra-dermabrasión + Electroporación + Baja Frecuencia</p> <p><i>Paciente necesario: Paciente mujer u hombre que desee un tratamiento de rejuvenecimiento de la piel.</i></p> <p>Aplicación de solución CELLMULA HSR para cuidado de la piel.</p>
15 minutos	<p>Limpieza de las piezas de mano después del tratamiento.</p> <p>Limpieza del equipo en modo C.</p>
30 minutos	<p>Tratamiento 2: Tratamiento completo: Hidra-dermabrasión + Electroporación + Baja Frecuencia</p> <p><i>Paciente necesario: Paciente mujer u hombre que desee un tratamiento de rejuvenecimiento de la piel.</i></p> <p>Aplicación de solución CELLMULA HSR para cuidado de la piel.</p>
30 minutos	<p>Tratamiento 3: Tratamiento completo: Hidra-dermabrasión + Electroporación + Baja Frecuencia</p> <p><i>Paciente necesario: Paciente mujer u hombre que desee un tratamiento de rejuvenecimiento de la piel.</i></p> <p>Aplicación de solución CELLMULA HSR para cuidado de la piel.</p>
30 minutos	<p>Tratamiento 4: Tratamiento completo: Hidra-dermabrasión + Electroporación + Baja Frecuencia</p> <p><i>Paciente necesario: Paciente mujer u hombre que desee un tratamiento de rejuvenecimiento de la piel.</i></p> <p>Aplicación de solución CELLMULA HSR para cuidado de la piel.</p>
30 minutos	<p>Tratamiento 5: Tratamiento completo: Hidra-dermabrasión + Electroporación + Baja Frecuencia</p> <p><i>Paciente necesario: Paciente mujer u hombre que desee un tratamiento de rejuvenecimiento de la piel.</i></p> <p>Aplicación de solución CELLMULA HSR para cuidado de la piel.</p>
20 minutos	Atención a preguntas

Requisitos para la capacitación

Requisitos para la sesión teórica

Es recomendable contar con un área cómoda para llevar a cabo la sesión teórica. Para tal efecto tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Deberá de ser lo suficientemente amplia para alojar todas las personas que tomaran la capacitación.
- Contar con iluminación adecuada.

Requisitos para la sesión práctica

Comúnmente podrá utilizar un consultorio estándar o cubículo destinado para este tipo de procedimientos. Te pedimos de favor que cuentes con las siguientes consideraciones.

- Cubículo amplio y cómodo para los tratamientos.
- Iluminación agradable.
- Contar con camilla reclinable para tratamientos faciales y corporales.
- **Todos los pacientes deberán saber que el tratamiento que se les realizará será con el fin de entrenamiento.**

Material necesario

El siguiente material es necesario para llevar a cabo los tratamientos. Para la capacitación, la persona encargada llevará lo necesario para el correcto desarrollo del entrenamiento.

- 2 x Solución CELLMULA HSR para cuidado de la piel.
- 2 x Electro máscara de iones.
- Limpiador facial Vital Mild Cleansing Foam CELLMULA.
- Crema reparadora True Repair Cream CELLMULA.
- Mascarilla Vital Hydra Soothing Mask CELLMULA.
- Microdacyn o algún tipo de antiséptico.
- Guantes (no estéril).
- Cubre bocas.
- Abate lenguas.

En medida que cumpla con los requisitos antes señalados, el desarrollo del entrenamiento se llevara a cabo de una manera coordinada y adecuada a los objetivos del programa.