

Hydra Beauty 2

Manual de usuario y Guía de Tratamientos



IMPORTANTE

1. Debe consultar las guías proporcionadas antes de realizar un tratamiento con este dispositivo. Los resultados del tratamiento pueden variar según la condición del paciente y el entorno del tratamiento.
2. Debe evaluar cuidadosamente el estado del paciente al ajustar los niveles adecuados y al realizar el tratamiento.
3. Los tratamientos deben ser realizados por una persona que haya recibido la capacitación adecuada.
4. El operador debe leer cuidadosamente este manual de usuario y tomar en cuenta todos los riesgos, advertencias y precauciones.
5. Los parámetros y técnicas de procedimiento contenidos en estas guías no son absolutos. La información proporcionada no debe utilizarse como el único criterio para tomar decisiones de tratamiento. Estas guías han sido elaboradas por Eunsung Global Corp. como material de referencia para la realización de tratamientos.
6. Eunsung Global Corp. no se hace responsable de problemas que ocurran por razones distintas a defectos del dispositivo, como negligencia del operador durante el tratamiento o falta de la capacitación adecuada.

Contenido

Tecnología Hydra Beauty 2	1
Solución Aqua	1
Punta radial especializada	2
Terapia H2	2
Agua hidrogenada	3
Terapia de Electroporación	3
Peeling con punta de diamante	3
Puntas de Micro-Vibración	4
Guía de tratamiento	5
ETAPA 1 – Preparación antes del tratamiento	5
1.1 Pacientes adecuados para el tratamiento Hydra Beauty 2	5
1.2 Cómo realizar la consulta con el paciente	6
1.3 Contraindicaciones	7
1.4 Recomendaciones antes del tratamiento	8
1.5 Preguntas y Respuestas	9
ETAPA 2 – Guía de tratamiento	11
2.1 Lista de componentes	11
2.2 Sistema	13
2.3 Precauciones	18
ETAPA 3 – Cómo realizar el tratamiento	19
3.1 Secuencia del tratamiento	19
Pieza de mano Aqua	23
Pieza de mano de Electroporación (EP)	31
Pieza de mano de Diamante	35
Pieza de mano de Vibración	37
Tratamiento Opcional	41
3.2 Recomendaciones para el tratamiento	45
ETAPA 4 – Cuidados posteriores al tratamiento	47
4.1 Recomendaciones después del tratamiento	47
4.2 Método de limpieza después del tratamiento	48

Tecnología Hydra Beauty 2

Uso simultáneo de peeling químico + peeling mecánico:

- Peeling químico: elimina el sebo y los residuos de los poros utilizando AHA y BHA.
- Peeling mecánico: succión potente de 15 kPa a 80 kPa (punta radial).

Solución Aqua

S1 – AHA Ácido Alfa Hidroxi (soluble en agua)

- Eliminación de queratina (capa superficial de la piel).
- Ingrediente principal: ácido láctico.



S2 – BHA Ácido Beta Hidroxi (soluble en grasa)

- Cuidado intensivo del exceso de grasa y puntos negros.
- Ingrediente principal: ácido salicílico.




S3 – Hidratación (Ácido hialurónico)

- Efecto calmante e hidratante en la piel.
- Ingredientes principales: agua de hoja de aloe vera, ácido hialurónico.




Punta radial especializada

A medida que la solución de peeling sale del centro de la punta: Se dispersa con fuerza, gira siguiendo un principio en espiral y aspira impurezas de los elimina de los poros sin rayar ni dañar la piel.

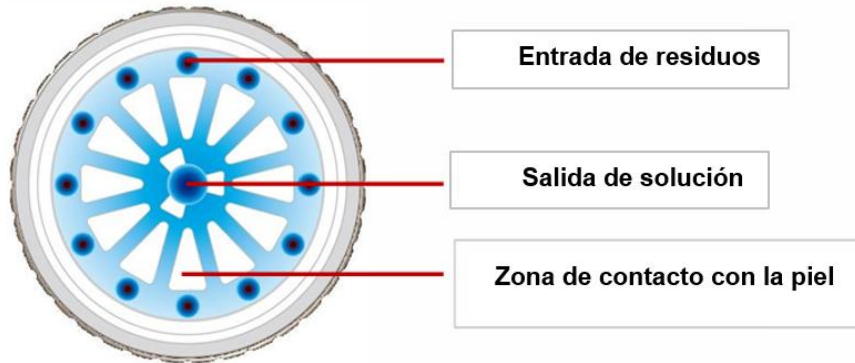

Terapia H2

El hidrógeno se combina con el oxígeno activo (radicales libres), que es dañino para el cuerpo humano, y se elimina del organismo en forma de agua (sudor).

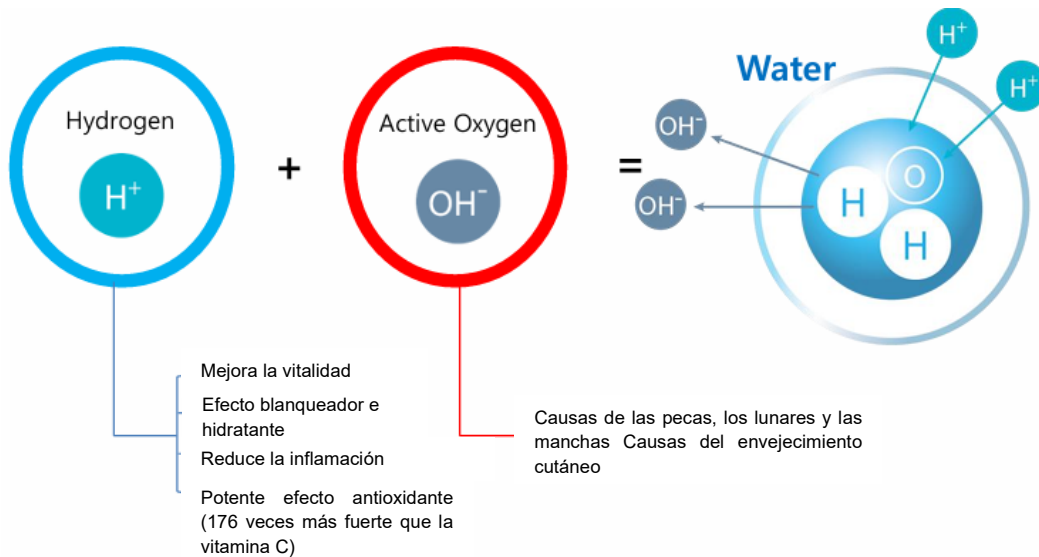


Agua hidrogenada

- Generación de agua con hidrógeno altamente concentrada (>1,500 ppb).
- Penetración de partículas finas de hidrógeno en la piel. Elimina el oxígeno activo y promueve el metabolismo celular.
- Acción antioxidante, antiinflamatorio y antialérgico.



Terapia de Electroporación

- Permite la introducción de soluciones a través de microcanales que se abren temporalmente en las membranas celulares y tejidos.
- Facilita la penetración directa de diversos activos sin causar daño ni alterar el sistema biológico ni sus funciones.

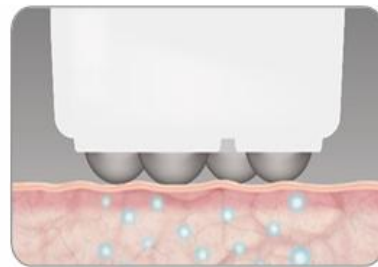

Peeling con punta de diamante

- Mejora la textura áspera de la piel.
- Reduce líneas finas y arrugas.
- Previene el envejecimiento de la piel.



Tipos de puntas: (Se diferencian por el nivel de abrasividad)

Puntas de Micro-Vibración



Punta de masaje



Punta hypo

- Aumenta la circulación sanguínea.
- Reduce la inflamación (hinchazón) y mejora el tono de la piel.
- Favorece la penetración de soluciones.
- Mejora la textura de la piel.



Punta de carbón



Crema balanceadora


- Exfolia células muertas.
- Mejora el tono de la piel.
- Mejora la textura de la piel.

Guía de tratamiento

ETAPA 1 – Preparación antes del tratamiento

1.1 Pacientes adecuados para el tratamiento Hydra Beauty 2

- Personas que desean blanquear, hidratar o mejorar la textura de la piel.
- Personas con alopecia o que desean prevenir la caída del cabello.
- Personas que buscan una rápida reincorporación a sus actividades diarias después del procedimiento.

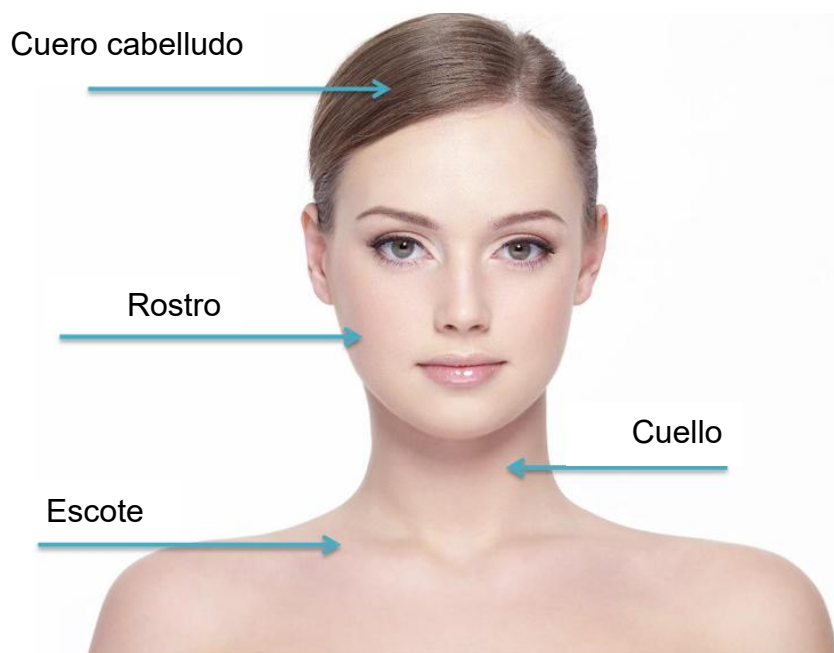

1.2 Cómo realizar la consulta con el paciente

1. Revisar el historial médico del paciente

- Historial médico previo y tratamientos realizados.
- Experiencia en cirugías o procedimientos anteriores.
- Condición médica actual y medicamentos que está tomando.
- Alergias a medicamentos.
- Uso de isotretinoína (ej. Accutane) en los últimos 6 meses.
- Historial de dermoabrasión química o tratamientos láser (como peeling TCA, fenol, etc.) dentro de las 2 semanas previas.

2. Determinar el área de tratamiento

- Identificar la zona que el paciente desea tratar.
- La correcta selección del área influye en la efectividad del tratamiento.
- Verificar que la evaluación previa sea adecuada.
- Explicar al paciente las opciones de tratamiento con las diferentes piezas de mano y soluciones.

3. Selección de la pieza de mano

Se selecciona según el tipo de piel y el objetivo del tratamiento:

- Electroporación: para penetración de soluciones.
- Pieza de mano Aqua: puede combinarse con otras piezas de mano.
- Las piezas de mano pueden combinarse según el objetivo del tratamiento.

4. Explicación del tratamiento al paciente

- Mecanismo y efectos del tratamiento Hydra Beauty 2.
- Posibles molestias durante el procedimiento y efectos secundarios.
- Resolver cualquier duda del paciente.

1.3 Contraindicaciones

 No se debe operar este dispositivo en pacientes que presenten cualquiera de las siguientes condiciones. Aunque el paciente no presente ninguna de ellas, se debe realizar una evaluación cuidadosa y repetida durante la consulta.

Contraindicaciones médicas:

- Tumores malignos.
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
- Epilepsia, infecciones o erupciones cutáneas.
- Enfermedades hemorrágicas (ej. hemofilia).
- Nefritis.
- Implantes metálicos.
- Diabetes.
- Uso de medicamentos anticoagulantes.
- Parálisis facial.
- Fiebre alta.
- Rellenos (fillers).
- Cortes sangrantes, zonas cercanas a ojos u oídos.
- Piel queloide.
- Pacientes con fiebre (mayor a 38°C).
- Niños.
- Herpes.
- Respuestas inflamatorias.
- Enfermedades cardiovasculares.
- Uso de marcapasos.
- Trastornos de la presión arterial.
- Enfermedades dermatológicas.
- Enfermedades autoinmunes.
- Lupus, vitiligo, leucoplasia.
- Periodo menstrual.
- Implantes (dentales, cirugía plástica, ortopedia).
- Enfermedades cutáneas crónicas (locales o generalizadas).
- Sensibilidad a terapias eléctricas.
- Otras enfermedades especiales o no especificadas.

 No utilizar junto con los siguientes dispositivos:

- Dispositivos médicos electrónicos implantables (marcapasos).
- Sistemas de soporte vital (corazón o pulmón artificial).
- Dispositivos electrónicos portátiles (electrocardiógrafo).
- No conectar el equipo a electroestimuladores.

 Consideraciones generales:

- Es posible ajustar el nivel o potencia del tratamiento según la condición del paciente.
- Los resultados pueden variar dependiendo de cada paciente.

1.4 Recomendaciones antes del tratamiento

48 horas antes

- Evitar la exposición excesiva al sol y el uso de camas de bronceado durante al menos 72 horas antes del tratamiento.
- Suspender el uso de Retin-A o tretinoína (tópica) al menos 48 horas antes del tratamiento Hydra Beauty 2.
- Evitar cualquier tipo de exfoliación, como ácidos glicólicos o enzimas, durante 48 horas previas.
- Evitar la depilación con cera o productos depilatorios durante 48 horas antes del tratamiento.

El día del tratamiento

- En hombres, no se recomienda afeitarse el mismo día.
- Si es necesario afeitarse, hacerlo al menos 3 a 4 horas antes del tratamiento.

1.5 Preguntas y Respuestas

¿Hay dolor durante el tratamiento Hydra Beauty 2?

Puede depender de la intensidad de la succión utilizada y del nivel de la pieza de mano. El grado de molestia varía de una persona a otra, por lo que debe explicarse claramente al paciente durante la consulta.

¿Cuánto tiempo dura el tratamiento Hydra Beauty 2?

- Tratamiento facial completo:
 - Exfoliación: 15–20 minutos.
 - Con penetración de activos: 20 minutos aprox.
 - Tratamiento completo con todas las piezas de mano: 40 minutos aprox.
- Tratamiento de cuero cabelludo:
 - 10–15 minutos, dependiendo del área tratada.

¿El tratamiento Hydra Beauty 2 es efectivo desde la primera sesión?

Sí, se pueden notar resultados desde una sola sesión, aunque pueden variar según cada persona. Generalmente se recomienda repetir el tratamiento cada 1 a 2 semanas, dependiendo del estado de la piel.

- En el caso del tratamiento capilar:
 - Es más difícil notar resultados en una sola sesión.
 - Se recomienda un tratamiento continuo durante al menos 3 meses, con sesiones cada 1 a 2 semanas.

¿Hay tiempo de recuperación después del tratamiento Hydra Beauty 2?

Después del tratamiento puede presentarse enrojecimiento leve debido a la irritación, el cual generalmente desaparece en unas pocas horas.

En tratamientos capilares, no se debe lavar el cabello el mismo día.

¿Se puede maquillar inmediatamente después del tratamiento Hydra Beauty 2?

Sí, es posible aplicar maquillaje de manera normal después del tratamiento.

¿Cuáles son los riesgos y efectos secundarios del tratamiento Hydra Beauty 2?

Es un tratamiento que causa mínimo daño a la piel. Sin embargo, dependiendo del tipo de piel, puede presentarse ligero enrojecimiento.

¿En qué áreas se puede aplicar Hydra Beauty 2?

Se puede aplicar en:

- Rostro.
- Cuero cabelludo.
- Cuello.
- Escote.

¿Cuántos pacientes se pueden tratar con una botella de solución diluida?

Una botella rinde aproximadamente para 8 a 12 tratamientos faciales completos. Pero el rendimiento puede variar según la técnica del operador.

ETAPA 2 – Guía de tratamiento

2.1 Lista de componentes

Unidad principal (Módulo de hidrógeno H2 instalado)	Pieza de mano Aqua + tapa	Pieza de mano de diamante
		
	Pieza de mano de vibración	Pieza de mano de electroporación
		
Cable para mascarilla	Soporte magnético	Botellas de solución (3 piezas)
		
Punta Aqua grande	Punta Aqua pequeña	Punta Aqua extragrande (corporal)
		

Set de puntas de diamante



Filtro para punta de diamante



Punta Hypo



Punta de masaje



Mascarilla Calmante con Tecnología de Electroporación



Manual de usuario



Cable de alimentación



Fusible



Soluciones Aqua



Punta de silicón Aqua



Kit balanceador detox




2.2 Sistema

Interfaz de usuario – Modo Aqua Peeling




No.	Descripción
1	Selección y visualización de la pieza de mano.
2	Configuración (ajuste de sonido, versión del software).
3	Selección de solución (Sol. 1 ~ 3, H2).
4	Ajuste del nivel de flujo (1 ~ 7, predeterminado: 4).
5	Ajuste del nivel de vacío (1 ~ 7, predeterminado: 3).
6	Botón de limpieza de la pieza de mano (45 segundos, flujo y vacío fijos).
7	Ajuste del tiempo de operación (1 ~ 30 min, predeterminado: 10 min).
8	INICIAR / DETENER.

Interfaz de usuario – Modo Peeling con punta de Diamante

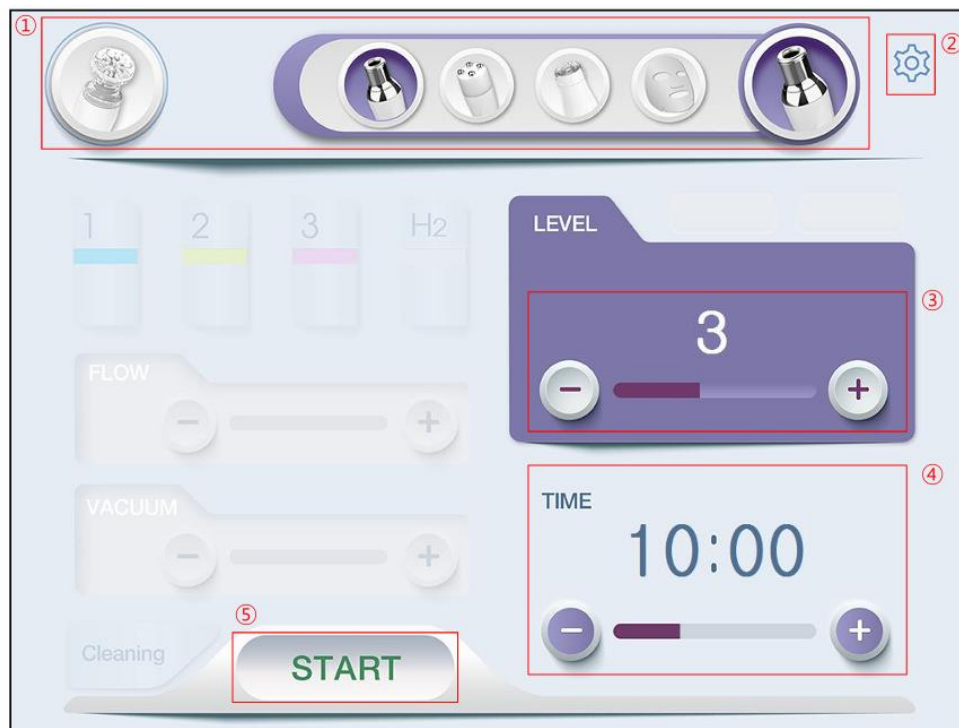

No.	Descripción
1	Selección y visualización de la pieza de mano.
2	Configuración (ajuste de sonido, versión del software).
3	Ajuste del nivel de vacío (1 ~ 7, predeterminado: 3).
4	Ajuste del tiempo de operación (1 ~ 30 min, predeterminado: 10 min).
5	INICIAR / DETENER.

Interfaz de usuario – Modo Electroporación

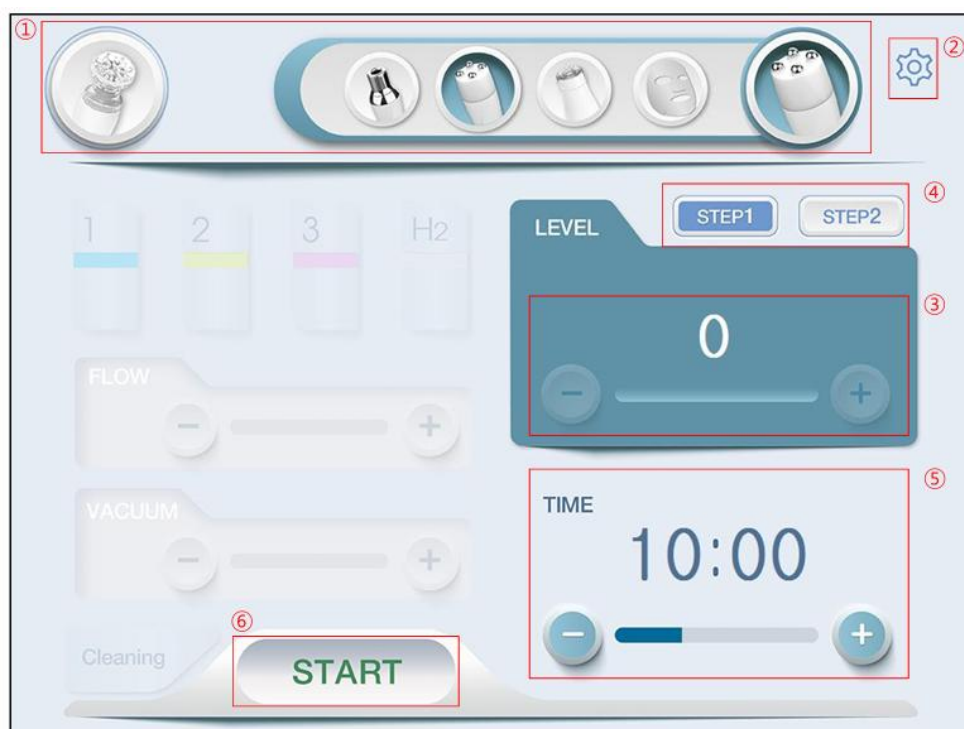

No.	Descripción
1	Selección y visualización de la pieza de mano.
2	Configuración (ajuste de sonido, versión del software).
3	Ajuste del nivel (0 ~ 10, predeterminado: 0).
4	Selección de paso (predeterminado: Paso 1).
5	Ajuste del tiempo de operación (1 ~ 30 min, predeterminado: 10 min).
6	INICIAR / DETENER.

Interfaz de usuario – Modo Vibración



No.	Descripción
1	Selección y visualización de la pieza de mano.
2	Configuración (ajuste de sonido, versión del software).
3	Ajuste del nivel (1 ~ 7, predeterminado: 3).
4	Selección del color LED (predeterminado: azul).
5	Ajuste del tiempo de operación (1 ~ 30 min, predeterminado: 10 min).
6	INICIAR / DETENER.

Interfaz de usuario – Modo Mascarilla Perfect Fit



No.	Descripción
1	Selección y visualización de la pieza de mano.
2	Configuración (ajuste de sonido, versión del software).
3	Ajuste del nivel (0 ~ 10, predeterminado: 0).
4	Selección de paso (predeterminado: Paso 1).
5	Ajuste del tiempo de operación (1 ~ 30 min, predeterminado: 10 min).
6	INICIAR / DETENER.

2.3 Precauciones

- Asegúrese de revisar todas las preparaciones antes de iniciar el tratamiento.
- La pieza de mano Aqua debe operarse de forma segura después de confirmar la presión y el flujo adecuados mediante una prueba previa al tratamiento.
- Al utilizar la pieza de mano Aqua, si hay cualquier impureza o partícula extraña en la solución, esta debe ser reemplazada antes de su uso.
- La pieza de mano de electroporación (EP) debe utilizarse de forma segura después de confirmar el nivel adecuado mediante pruebas previas.
- Al usar la pieza de mano EP, se debe aplicar suficiente solución para evitar la resequedad de la piel.
- La información contenida en esta guía no debe utilizarse como la única base para tomar decisiones de tratamiento.
 - La intensidad del tratamiento puede variar según la condición del paciente.
 - Los resultados pueden diferir en cada paciente.

ETAPA 3 – Cómo realizar el tratamiento

3.1 Secuencia del tratamiento

Cómo diluir la solución

Paso 1

- Preparar la solución, agua destilada y botellas vacías.



Paso 2

- Colocar la solución en una botella vacía con la misma etiqueta correspondiente.
- Agregar agua destilada hasta la línea de la botella.
- Cerrar la tapa y agitar para diluir correctamente.




Nota:

- Se recomienda utilizar la solución diluida dentro de 1 a 2 semanas.
- El tiempo de conservación puede variar según el entorno de uso.

Instalación de las botellas de solución

Paso 3

- Retire la tapa de la botella de solución e instálela en orden: S1 → S2 → S3.

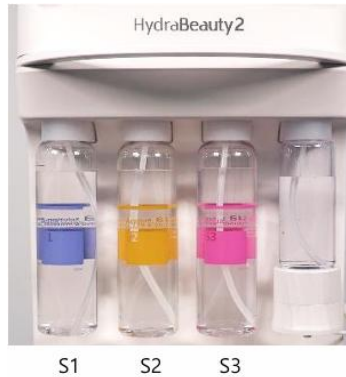

Paso 4

- Llene la última botella con agua potable.
- Instale el módulo de hidrógeno en el extremo derecho del equipo.
- Conecte el conector del módulo de hidrógeno al dispositivo.

Nota:

- Se debe utilizar agua potable para asegurar un flujo eléctrico adecuado dentro del generador de hidrógeno.



Instalación de la botella de residuos

Paso 5

- Instale la botella de desecho en la parte trasera del dispositivo.
- Conecte la botella de desecho al conector ubicado en la parte posterior del equipo.

Nota:

- Si la botella de desecho no está correctamente conectada, el vacío puede debilitarse y provocar un mal funcionamiento del dispositivo.



Pieza de mano Aqua



Cómo usar la pieza de mano Aqua

Paso 1

- Presione el botón de inicio (Start) para operar el equipo después de ajustar al máximo el nivel de vacío y el control de la solución.



Paso 2

- Coloque la pieza de mano Aqua cerca del dorso de su mano y espere a que la solución comience a salir. Este proceso tarda aproximadamente 15 segundos.



Paso 3

- Una vez que la solución comience a salir, utilícelo ajustando la presión de vacío y la cantidad de solución.



Paso 4

- Antes de iniciar el tratamiento, realice una prueba de parche en el cuello utilizando la solución 1 (S1).



Cómo usar la solución 1 (AHA)

Paso 5

- Divida el rostro en dos partes y comience el tratamiento, por un lado.
- Realice el tratamiento en el siguiente orden: mentón → mejillas → frente.



Parámetros recomendados:

Flujo	Vacío	Pasadas
1-2	2-3	2

Paso 6

- Aplique de manera uniforme con la mano para evitar que la solución se escurra durante el tratamiento.

Cómo usar la solución 2 (BHA)

Paso 7

- Divida el rostro en dos partes y comience el tratamiento, por un lado.
- Realice el tratamiento en el siguiente orden: mentón → mejillas → frente.



Parámetros recomendados:

Flujo	Vacío	Pasadas
1-2	2-3	2


Paso 8

- Aplique de manera uniforme con la mano para evitar que la solución se escurra durante el tratamiento.

Cómo usar el modo C (Limpieza interna de la pieza de mano)

Paso 9

- Una vez finalizado el tratamiento con la solución 2, coloque la tapa protectora en la pieza de mano.
- Seleccione el botón “C” (Cleaning) en la pantalla y ponga en funcionamiento el equipo.
- El sistema limpiará automáticamente la manguera de la pieza de mano durante 45 segundos.

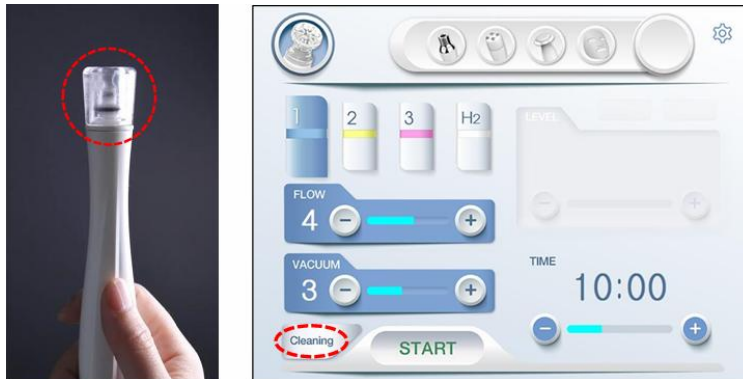

Instalación de la tapa protectora de la pieza de mano:

- Seleccionar modo C (Cleaning).
- Ajustar flujo y vacío al máximo.
- Presionar el botón Start.
- El equipo se detendrá automáticamente después de 45 segundos.

Nota:

- Al activar el modo C, el proceso de limpieza se detiene automáticamente después de 45 segundos.

Cómo usar el agua hidrogenada (H2)

Paso 10

- Divida el rostro en dos partes y comience el tratamiento, por un lado.
- Aplique de manera uniforme en todo el rostro con movimientos tipo “stamping” (sellado) en el siguiente orden: mentón → mejillas → frente.



Parámetros recomendados:

Flujo	Vacío	Pasadas
3-4	2-3	2

Paso 11

Aplique de manera uniforme con la mano para evitar que la solución se escurra durante el tratamiento.

Cómo usar la solución 3 (Ácido hialurónico)

Paso 12

- Divida el rostro en dos partes y comience el tratamiento, por un lado.
- Aplique de manera uniforme en todo el rostro con movimientos tipo “stamping” (sellado) en el siguiente orden: mentón → mejillas → frente.



Parámetros recomendados:

Flujo	Vacío	Pasadas
3-4	2-3	2


Paso 13

- Aplique de manera uniforme con la mano para evitar que la solución se escurra durante el tratamiento.

Paso 14

- Una vez finalizado el uso de la solución 3, coloque la tapa protectora en la pieza de mano.
- Seleccione el botón “C” (Cleaning) en la pantalla y active el equipo.
- La manguera de la pieza de mano se limpiará automáticamente durante 45 segundos.

Pieza de mano de Electroporación (EP)

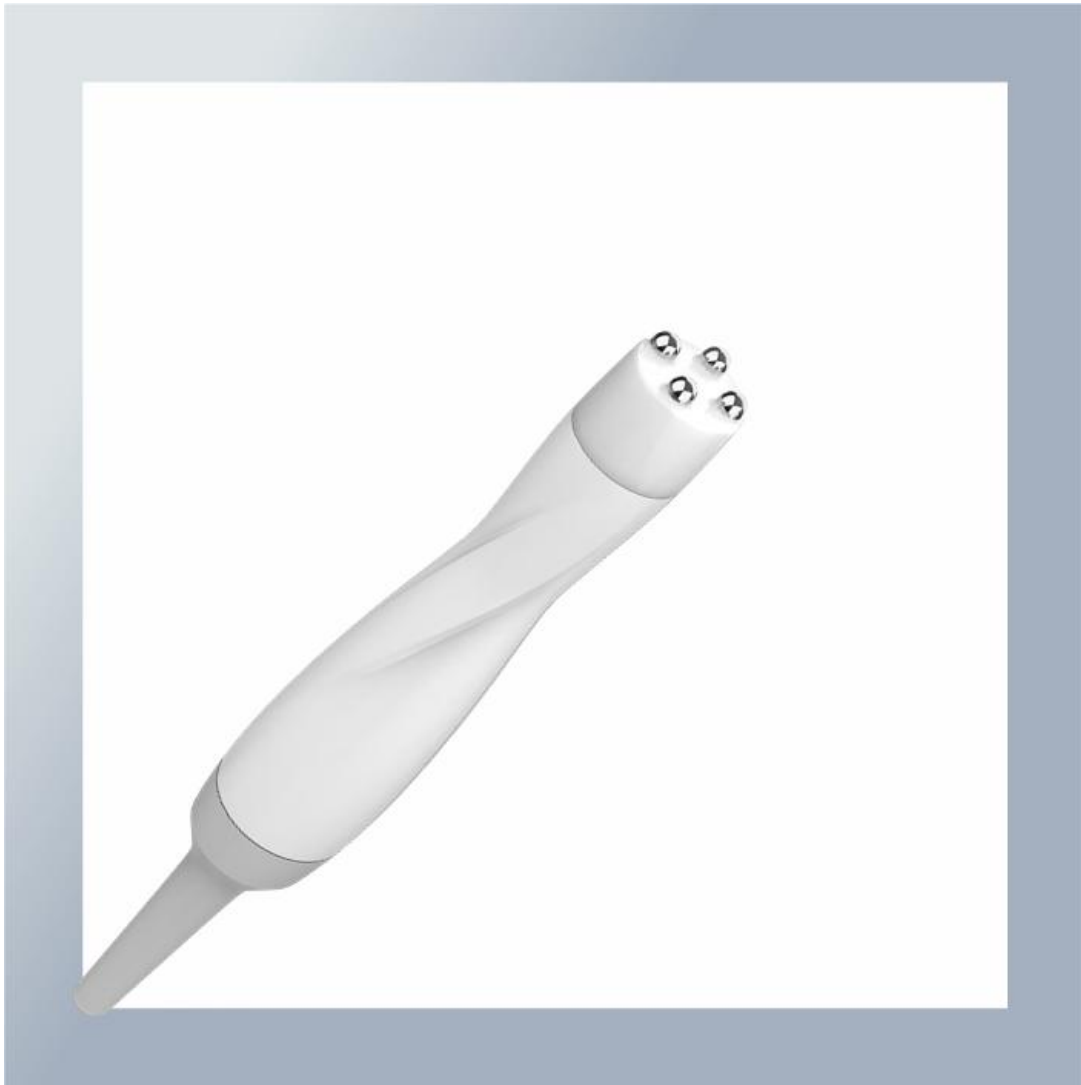

Cómo usar la electroporación

Paso 1

- Seleccione el modo de electroporación en la pantalla.
- Aplique suficiente solución sobre la piel antes de iniciar el tratamiento.



Paso 2

- Durante el tratamiento, comience en nivel 1.
- Evalúe la tolerancia del paciente y ajuste al nivel adecuado para realizar el tratamiento de forma segura.



Parámetros recomendados:

Nivel	2-4
Tiempo	7-10 min


Paso 3

- Limpie el rostro del paciente y la pieza de mano después del tratamiento.

Cómo usar la mascarilla

Paso 1

- Seleccione el icono del tratamiento de la mascarilla de electroporación.
- Conecte los electrodos magnéticos marcados con polos + y - en los bordes de la mascarilla.
- Comience con un nivel bajo al inicio y aumente gradualmente la intensidad durante el tratamiento.

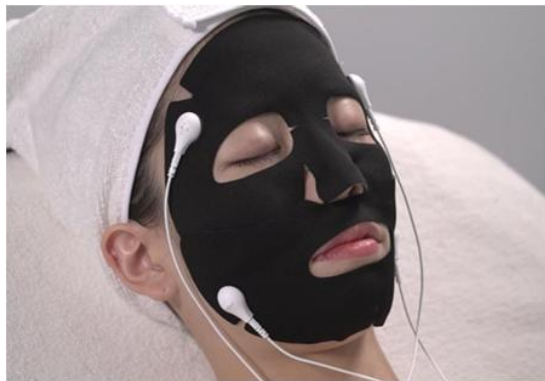

Parámetros recomendados:

Nivel	2-4
Tiempo	7-10 min

Pieza de mano de Diamante



Paso 1

Cómo usar la punta de diamante

- El peeling de diamante es opcional y puede realizarse de forma selectiva.
- Si se combina con el aqua peeling, se recomienda realizar primero el peeling de diamante en piel seca.
- Coloque el filtro y la punta de diamante en la pieza de mano.
- Lave la punta de diamante con agua limpia, desinféctela y guárdela.



Parámetros recomendados:

Vacío	1-2
Pasadas	1

Nota:

- Las puntas de diamante se dividen en 10 / 20 / 30 según el nivel de abrasividad.
- Para tratamientos faciales, se recomienda usar la punta 30 y el nivel de vacío no debe exceder nivel 1 en rostro.

Pieza de mano de Vibración



Paso 1

Cómo usar la punta de masaje

- Seleccione la pieza de mano de vibración en la pantalla y active el modo de vibración.
- Aplique suficiente solución sobre la piel antes de iniciar el tratamiento.



Paso 2

- Ajuste el nivel con los botones de control: Rango: 1 – 7 y el nivel predeterminado: 3.



Parámetros recomendados:

Nivel	3
Tiempo	7-10 min

Paso 3

- Limpie el rostro del paciente y la pieza de mano después del tratamiento.

Cómo usar la punta Hypo

Paso 1

- Seleccione la pieza de mano de vibración en la pantalla y active el modo de vibración.
- Aplique suficiente solución sobre la piel antes de iniciar el tratamiento.



Paso 2

- Ajuste el equipo a nivel 1.
- Aplique la punta con presión firme realizando movimientos tipo “stamping” (sellado).



Parámetros recomendados:

Nivel	1
Tiempo	3-5 min

Paso 3

- Limpie el rostro del paciente y la pieza de mano después del tratamiento.

Cómo usar la punta de Carbón

Paso 1

- Seleccione la pieza de mano en la pantalla y active el modo de vibración.
- Aplique suficiente Crema balanceadora sobre la piel antes de iniciar el tratamiento.



Paso 2

- Ajuste el nivel a 1 o 2.
- Aplique la punta en contacto directo con la piel y trabaje todo el rostro mediante movimientos de frotación.



Parámetros recomendados:

Nivel	1-2
Tiempo	4-5 min

Paso 3

- Limpie el rostro del paciente y la pieza de mano después del tratamiento.
- La punta de carbón es desechable y debe usarse solo una vez.

Tratamiento Opcional



Peeling Químico

Opciones

- El peeling químico es opcional y puede realizarse de forma selectiva (puede omitirse).
- No realizar peeling químico en pacientes que ya hayan recibido peeling de diamante.
- Iniciar el tratamiento en la zona T y zona U del rostro, aplicar la solución de peeling químico en todo el rostro y utilizar la pieza de mano Aqua para comenzar el tratamiento.
- Ajustar el flujo en OFF (apagado), ajustar el vacío en nivel 1 y proceder con el tratamiento.



Parámetros recomendados:

Flujo	Vacío	Pasadas
0	1	1

Nota:

- Al aplicar la solución de peeling químico, el paciente puede experimentar hormigueo o una ligera picazón.

Cómo usar la punta de silicón para tratamiento capilar

Opcional

- Coloque la punta de silicón en la pieza de mano Aqua.
- Ajuste el control de vacío y solución hacia la derecha (máximo) para verificar que la solución fluya correctamente, después, ajuste la presión de vacío y el flujo según la condición del cuero cabelludo.
- Aplique la punta de silicón sobre el cuero cabelludo y divida las secciones en intervalos de aproximadamente 1 cm.
- Después del tratamiento, retire la punta de la pieza de mano y coloque la tapa protectora para su almacenamiento.

Nota:

- Se recomienda que la punta de silicón sea de un solo uso.



▲ Install the silicon tip to aqua handpiece



Parámetros recomendados:

Flujo	Vacío	Pasadas
2-3	2-3	1-2


Cómo usar la punta corporal

Opcional

- Coloque la punta corporal en la pieza de mano Aqua.
- Seleccione la solución que desea utilizar y verifique que esté disponible.
- Realice el tratamiento ajustando la presión de vacío y el flujo de la solución.
- Trabaje el área dividiendo en secciones de aproximadamente 1 cm.
- Después del tratamiento retire la punta de la pieza de mano y coloque la tapa protectora para su almacenamiento.

Nota:

- Se recomienda que la punta corporal sea de un solo uso.

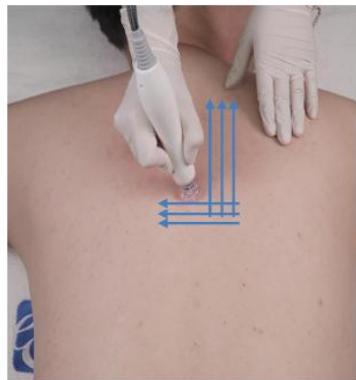

Parámetros recomendados:

Flujo	Vacío	Pasadas
1	2-3	1-2

3.2 Recomendaciones para el tratamiento

Recomendaciones para el uso del Peeling de diamante

- Las puntas de diamante se dividen en 10 / 20 / 30 según la rugosidad de la superficie.
- Para el rostro, se recomienda utilizar la punta 30 y el nivel de vacío debe utilizarse máximo en nivel 1.
- Durante el tratamiento, es obligatorio instalar el filtro en la pieza de mano.

Recomendaciones para el peeling químico

- No realizar en pacientes que ya hayan recibido el peeling de diamante.
- Iniciar en la zona T y zona U, aplicar la solución en todo el rostro y se recomienda usar el vacío en nivel 1.

Recomendaciones para cada solución Aqua

- Utilizar la pieza de mano Aqua solo después de confirmar la presión adecuada y el flujo correcto (prueba previa).
- Se recomienda que la punta Aqua sea de un solo uso.
- Seguir la dirección de tratamiento indicada (según imagen del manual).



Recomendaciones para electroporación y mascarilla de electroporación

- Debido a las diferencias individuales, siempre iniciar con niveles bajos y ajustar gradualmente hasta encontrar el nivel adecuado.
- Mantener la pieza de mano en contacto con la piel donde ya se haya aplicado la solución.
- Realizar el tratamiento de forma lenta y controlada.

ETAPA 4 – Cuidados posteriores al tratamiento

4.1 Recomendaciones después del tratamiento

Inmediatamente después del tratamiento

- Evitar acudir a spa, sauna o vapor durante al menos 24 horas.
- Asegurarse de utilizar protector solar.

Dentro de las primeras 48 horas

- Suspender el uso de Retin-A o tretinoína tópica durante al menos 48 horas.
- Evitar la depilación con cera o productos depilatorios durante al menos 48 horas.
- Evitar cualquier tipo de exfoliación, incluyendo ácidos glicólicos o enzimas, en el área tratada durante 48 horas.

Cómo maximizar los resultados del tratamiento

- El tratamiento Hydra Beauty 2 debe realizarse de forma periódica, no solo una vez, para obtener mejores resultados.
- Es posible sentir resequedad después del procedimiento, esto es una reacción normal. Se recomienda aplicar suficiente hidratación (productos humectantes).

4.2 Método de limpieza después del tratamiento

Limpieza de la pieza de mano

- Retire las puntas utilizadas durante el procedimiento y elimine los residuos.
- Las puntas de la pieza de mano, excepto las de diamante, son desechables:
 - No deben reutilizarse.
 - Deben desecharse después de cada uso.
- Después de retirar la punta de diamante:
 - Lávela con un cepillo suave bajo agua corriente.
 - Séquela completamente antes de guardarla.
- Al finalizar el procedimiento, asegúrese de activar el modo de limpieza automática.
 - Esto es esencial para prevenir infecciones bacterianas y mantener la higiene.
- Limpie el equipo con una toallita húmeda y después con un paño seco.
- Verifique que las conexiones de las puntas no estén contaminadas o impregnadas y límpielas cuidadosamente.
- Cuando limpie el equipo o no lo utilice por un periodo prolongado:
 - Retire la punta.
 - Guárdelo con la tapa protectora de la pieza de mano.

Limpieza del módulo de agua con hidrógeno

- El electrodo del módulo de hidrógeno debe limpiarse una vez al mes.
- Para limpiar el electrodo, llene el recipiente con 50 ml de vinagre o diluyente de ácido cítrico y 100 ml de agua, y active el modo de limpieza.
- Después de 45 segundos:
 - Vacíe la botella de agua con hidrógeno.
 - Enjuague con agua corriente.
 - Llene nuevamente con agua potable.
 - Active otra vez el modo de limpieza para finalizar.

Nota:

- Al retirar el contenedor de agua con hidrógeno:
 - Sujételo correctamente.
 - Límpielo siguiendo el método recomendado.

Método de limpieza de la botella de residuos

- Revise y vacíe la botella de residuos periódicamente antes de que se llene.
- Gire la tapa de la botella hacia la dirección de apertura para separar la botella de la tapa.
- Vacíe el contenido de residuos, luego:
 - Lave la botella con detergente neutro y agua corriente.
 - Séquela completamente y vuelva a instalarla para su uso.
- Al volver a conectar la botella y la tapa:
 - Alinee la manija con la marca de cierre (Close) girando hacia la izquierda.
- Asegúrese de que el empaque no se salga durante el proceso.



Dirección de cerrado

Precauciones al volver a ensamblar la botella

- Si la tapa y la botella no están correctamente ensambladas:
 - El vacío puede debilitarse.
 - El empaque puede dañarse.



Sellado normal



Sellado deficiente

Ventas y servicio al cliente

Para cualquier consulta o requerimiento de servicio, soporte o adquisición de accesorios, consulte con su distribuidor local.

MedeStore

Carretera a Los Arqitos 603, Los Arqitos Jesús María, AGU

Tel: 449 4782400

Teléfono de servicio técnico: 449 4782442

