


# EPN

## ELECTROPORATION NEEDLE SYSTEM

Equipo de nueva generación que permite entregar de forma eficiente iones en la piel.

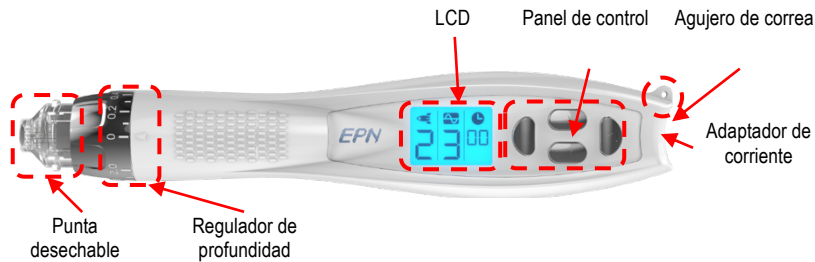

### Incluido en el empaque

Empaque	Equipo EPN		Adaptador de corriente
	Correa	Cubierta de punta	Guía de uso




#### EPN Multi agujas

- Agujas desechables estériles.
- Calibre 34, 9 puntas.
- Agujas electrodo (transmiten electroporación).
- Ajuste de profundidad hasta 2.0mm.
- Caja con 24 piezas.

### Especificaciones

Consumo de energía	10 VA		
Voltaje	Entrada AC100-240V 50/60Hz / Salida DC12V 1A		
Profundidad de agujas	0 a 2.0mm	Calibre de agujas	34G (0.16mm)
Velocidad	3 niveles	Electroporación	5 niveles
Aguja / Punta	Desechable, multi aguja	Peso	95 gramos

### LCD y Panel de Control

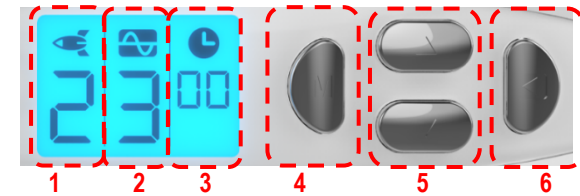

	Descripción		Descripción
1	Velocidad de aguja	4	Botón de selección de modo
2	Nivel de electroporación	5	Botón para aumentar / disminuir
3	Tiempo de tratamiento	6	Inicio / Detener

### Uso

1. Retire la cubierta protectora en la punta del EPN.
2. Coloque una punta nueva al equipo.
3. Conecte el adaptador de corriente y encienda su equipo.
4. Configure la velocidad, nivel de electroporación y profundidad de la punta.
5. Presione el botón Inicio / Detener para comenzar el tratamiento.
6. Presione el botón Inicio / Detener para detener el tratamiento.
7. Desconecte el cable de alimentación del equipo.

- La pantalla LCD se apagará automáticamente cuando no use el equipo por 3 minutos. Cuando sucede, puede volver a encenderlo presionando cualquier botón del Panel de control.

- Después de usar, retire la punta usada y coloque la cubierta de punta incluida, de lo contrario puede entrar polvo o sustancias que dañen su equipo.

- **Sea cuidadoso al colocar una punta nueva, si no lo hace correctamente o queda suelta, al encender su equipo, este podría dañarse.**





## GUÍA DE TRATAMIENTOS

### Tratamiento en cuero cabelludo

	Método	Profundidad	Pases
Cuero cabelludo	Sólo micro-agujas	1.0 mm	2 a 3 pases
	Micro-agujas + EP	0.5 mm	2 a 3 pases

Considere disminuir la profundidad en las áreas frontal, temporal y occipital debido al dolor que pueden causar las agujas.

Ciclo de tratamiento: Cada 1 a 2 semanas.

### Tratamiento facial

	Región	Profundidad	Pases
Cara	Mejillas / Nasolabial	1.0 mm	2 a 3 pases
	Otra área	0.5 mm	2 a 3 pases

Considere disminuir la profundidad en cercanas al hueso debido al dolor que pueden causar las agujas.

Se considera que siempre utiliza la modalidad de Micro-agujas + EP.

Ciclo de tratamiento: Cada 3 semanas.

