


PROTOCOLO CELLMULA™

PARA RESTAURACIÓN CAPILAR **SOLUCIÓN HD**

CANDIDATOS

De acuerdo a esta tabla, pacientes con hasta grado 5 son candidatos para el tratamiento de restauración capilar.

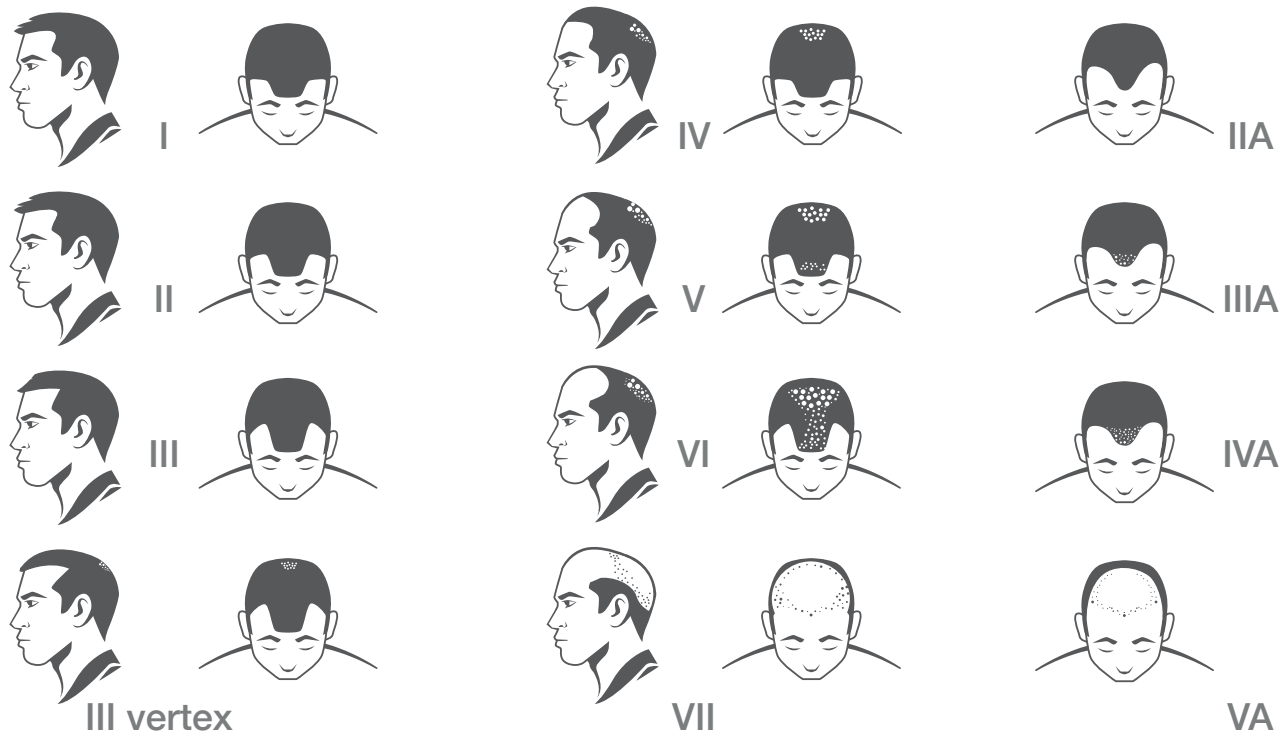

APLICACIONES

- ▶ Pacientes con alopecia, hombres y mujeres.
- ▶ Pacientes con cabello delgado, hombres y mujeres.
- ▶ Receptores de trasplantes capilares que buscan incrementar el porcentaje de supervivencia.
- ▶ Pacientes con alopecia que quieren combinar con otros tratamientos para evitar la pérdida de cabello o bien lograr la restauración capilar.

SESIONES Y PERIODICIDAD

Sugerencia:

- ▶ Una vez a la semana para los primeros 10 tratamientos.
- ▶ Una vez cada dos semanas para los siguientes cuatro tratamientos.
- ▶ Una vez al mes hasta lograr los resultados deseados o hasta que el médico lo determine.

❖ Cuero Cabelludo

Técnica	Profundidad	Nivel de EP	Pasadas
Estampado o Lineal	0.7-1.0 mm	1-2	2-3 pasadas
EP + Lineal	0.3-0.5 mm	1-2	2-3 pasadas

EP= Electroporación

PROTOCOLO

1. Lave y seque el cuero cabelludo.
2. Aplique crema anestésica tópica.
3. Después de 30 minutos, limpie la crema anestésica.
4. Aplique la **Solución HD** en el cuero cabelludo, dividiendo por secciones horizontales.
5. Lleve a cabo el procedimiento con el EPNeedle, conforme las indicaciones del manual. Repita los pasos 4 y 5, para todas las zonas necesarias.
6. Puede aplicar luz led al finalizar el tratamiento.

INDICACIONES DEL PROCEDIMIENTO

1. Ajuste la profundidad de acuerdo con el número de procedimientos y el grado de pérdida de cabello.
2. Asegúrese de dividir en varias secciones durante el procedimiento, de lo contrario las agujas no podrán penetrar de forma adecuada en el cuerpo cabelludo debido al cabello.



DOSIS RECOMENDADA

Una ampolleta de 5ml por sesión.

CELLMULA HD

