

POWERSHAPE²™

Programa de entrenamiento



Programa de entrenamiento PowerShape 2

Información general

Queremos agradecer el haber adquirido su nuevo equipo de PowerShape2 es un tratamiento integral de moldeado corporal, celulitis y lifting facial, estamos seguros de que cumplirá con todas sus expectativas.

Gran parte del éxito en el uso cotidiano de su equipo depende de un correcto entrenamiento, por lo cual le pedimos que lea detenidamente el presente documento.

Objetivos del programa

- Presentar un programa de entrenamiento teórico y práctico, para el uso y aprovechamiento adecuado de su equipo PowerShape 2.
- Dar a conocer a los participantes la funciones, ventajas, alcances, limitaciones del equipo.

Conocimientos que obtendrán los participantes

- Será capaz de programar el equipo para los diferentes tratamientos y condiciones del paciente.
- Será capaz de analizar y valorar la condición actual de los probables pacientes, y si es que son candidatos para llevar a cabo el tratamiento de PowerShape 2.
- Será capaz de informar al paciente sobre los resultados y alcances que pueda ofrecer al someterse al tratamiento de PowerShape 2.
- Conocerá los posibles riesgos y contraindicaciones en el tratamiento con PowerShape 2.

Conocimientos previos requeridos

Para el máximo aprovechamiento de su entrenamiento, es necesario cuente con los siguientes conocimientos:

- Conocer las diferentes capas de la piel.
- Tener conocimiento de cómo realizar adecuadamente un masaje de drenaje linfático.
- Conocer los diferentes grados de celulitis.
- El personal que será capacitado deberá haber leído previamente el manual de usuario y cualquier otra guía o documento anexo.

Para el mejor aprovechamiento del entrenamiento

Considere que usted ha hecho una gran inversión para la adquisición de su nuevo equipo PowerShape 2, además que su paciente espera que usted le ofrezca los mejores resultados posibles con el mismo, por lo cual es importante que tome en cuenta las siguientes consideraciones para el presente programa de entrenamiento.

- El entrenamiento se lleva a cabo durante un día, aproximadamente de cuatro a cinco horas, por lo que es recomendable durante ese día el personal que vaya a ser entrenado no tenga citas durante ese tiempo.
- Parte del éxito del entrenamiento es que el personal que estará encargado del uso del equipo haya analizado detenidamente la información en el manual de usuario y todos los documentos entregados previos a la capacitación.
- Es muy importante contar con los pacientes requeridos para la práctica, de otra manera no será posible completar los conocimientos obtenidos en la sesión teórica.

Sesión teórica

10 minutos	Aclaración de preguntas sobre el manual de usuario y protocolo.
20 minutos	<p>Teoría de acción de PowerShape 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnologías: <ul style="list-style-type: none"> ○ Láser frío. ○ Masaje subdérmico (vacuum). ○ Radiofrecuencia. • Indicaciones y contraindicaciones. • Selección de pacientes. • Cuidados de pacientes post tratamiento. <p>• Atención a preguntas.</p>

Sesión práctica

Es muy importante que el paciente haya asistido a una valoración previa y llenado su consentimiento informado. Los siguientes se consideran contraindicaciones, por lo que, si alguno de los pacientes presenta alguna de estas condiciones, no podrá ser tratado.

- Cáncer.
- Mujeres embarazadas o lactantes.
- Herpes.
- Pacientes con enfermedad cardíaca o persona con un marcapasos cardíaco.
- Epiléptico.
- Lupus.
- Vitíligo.
- Infección, erupción.
- Inflamación.
- Capilares dilatados o venas varicosas.
- Tratamiento anticoagulante o enfermedad de la sangre o cardiopatía.
- Hinchazón de las glándulas.
- Anafilaxia hereditaria.
- Enfermedad de tiroides.
- Y otras enfermedades específicas.

Desarrollo: Se llevará a cabo un tratamiento de muestra por la persona encargada del entrenamiento. El resto de los tratamientos serán realizados por los asistentes, supervisados por la persona encargada.

30 minutos	Introducción del equipo. <ul style="list-style-type: none">• Estructura:<ul style="list-style-type: none">○ Pantalla.○ Piezas de mano (Rodillos, Multipolares (3), Térmicas (2)).○ Colocación de filtros en piezas de mano.○ Soporte de piezas de mano.○ Cajón de piezas de mano.○ Filtro de aire.• Cómo encender y apagar su equipo.• Conexión y desconexión de piezas de mano y mangueras.• Uso del sistema:<ul style="list-style-type: none">○ Pantalla inicial.○ Menú de Pieza de mano de rodillos.○ Menú de Pieza de mano Multipolar.○ Menú de Pieza de mano térmica.• Como iniciar y detener el tratamiento:<ul style="list-style-type: none">○ Desde la pantalla.○ Desde la pieza de mano.• Atención a preguntas.
------------	---

60 minutos	<p>Uso de la pieza de mano de Rodillos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación en espalda. • Aplicación en abdomen. • Aplicación en chaparreras. • Aplicación en piernas. <p><i>Paciente necesario: Paciente mujer que desee mejorar su contorno corporal. Recomendado con IMC máximo de 27. Puede o no tener celulitis.</i></p>
10 minutos	<p>Limpieza adecuada de la pieza de mano de rodillos</p>
75 minutos	<p>Uso de la pieza de mano Multipolar (Grande y Mediana Corporal)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación en espalda. • Aplicación en abdomen. • Aplicación en chaparreras y glúteos. • Aplicación en pierna anterior. • Aplicación en pantorrillas. <p><i>Paciente necesario: Paciente mujer que desee mejorar su contorno corporal. Recomendado con IMC máximo de 27. Puede o no tener celulitis.</i></p>
10 minutos	<p>Limpieza adecuada de las piezas de mano multipolares</p>
20 minutos	<p>Uso de la pieza de mano Multipolar Facial</p> <p><i>Paciente necesario: Paciente hombre o mujer maduro (30 a 45 años) que desee un tratamiento de drenaje linfático y efecto lifting para su rostro.</i></p>
20 minutos	<p>Uso de la pieza de mano térmica en tratamiento facial</p> <p><i>Paciente necesario: Paciente hombre o mujer maduro (30 a 50 años) que desee un efecto lifting para su rostro.</i></p>
5 minutos	<p>Limpieza adecuada de las piezas de mano térmicas</p>
30 minutos	<p>Protocolos de tratamiento PowerShape 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pacientes con celulitis y/o adiposidad localizada. • Mejoría de tono facial. • Protocolo para doble mentón y/o bolsas de grasa.
20 minutos	<p>Atención a preguntas</p>

Requisitos para la capacitación

Requisitos para la sesión teórica

Es recomendable contar con un área cómoda para llevar a cabo la sesión teórica. Para tal efecto tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Deberá de ser lo suficientemente amplia para alojar todas las personas que tomaran la capacitación.
- Contar con iluminación adecuada.

Requisitos para la sesión práctica

Comúnmente podrá utilizar un consultorio estándar o cubículo destinado para este tipo de procedimientos. Te pedimos de favor que cuentes con las siguientes consideraciones.

- Cubículo amplio y cómodo para los tratamientos.
- Iluminación agradable.
- Contar con camilla reclinable para tratamientos faciales y corporales.
- **Todos los pacientes deberán saber que el tratamiento que se les realizará será con el fin de entrenamiento.**

Material necesario

El siguiente material es necesario para llevar a cabo los tratamientos. Para la capacitación, la persona encargada llevará lo necesario para el correcto desarrollo del entrenamiento.

- Crema conductora CELLMULA.
- Protector solar CELLMULA.
- Crema reparadora CELLMULA.
- Mascarilla CELLMULA.
- Espuma limpiadora CELLMULA.
- Microdacyn o algún tipo de antiséptico.
- Guantes (no estéril).
- Cubre bocas.
- Abate lenguas.

El siguiente material, deberá de ser proporcionado por el médico:

- Material desechable (sábanas, bikini y top).
- Bata para el paciente.
- Recipiente para agua.
- Esponjas faciales.
- Agua termal.
- Cinta de medir.
- Papel y pluma.
- Cámara fotográfica.

En medida que cumpla con los requisitos antes señalados, el desarrollo del entrenamiento se llevara a cabo de una manera coordinada y adecuada a los objetivos del programa.