

PROTOCOLO **RESET**SKIN

PARA CUIDADO DE LA PIEL

APLICACIONES Y CANDIDATOS

- ▶ Piel envejecida.
- ▶ Arrugas finas.
- ▶ Acné activo.
- ▶ Cicatrices causadas por acné.
- ▶ Poro abierto.

SESIONES Y PERIODICIDAD

- ▶ Se recomiendan al menos 4 sesiones.
- ▶ Realice una sesión cada semana.

PROTOCOLO

1. Aplique anestésico tópico sobre toda la piel.
 2. Después de 30 minutos, retire el anestésico de la piel.
 3. Limpie la zona a tratar (cara).
 4. Aplique la solución de Reset Skin en toda la piel.
 5. Realice el protocolo de EPN como se menciona en el manual.
- ▶ Tenga en cuenta que la profundidad de la aguja debe de ser de 0.5, al ser más profundo, el sangrado podría evitar que el producto penetre en la piel.
El nivel de electroporación se recomienda en 1.
 - ▶ Tenga en cuenta que las soluciones de Reset Skin tiene componentes que proporcionan una barrera humectante, por lo que **NO ES NECESARIO** volver a aplicar al terminar el tratamiento.
De hacerlo, podría quedar producto en la piel sin absorber, creando una capa blanca.

❖ Rejuvenecimiento, Aclaramiento y Cierre de poros.

Técnica	Profundidad	Nivel de Electroporación	Pasadas
Estampado o Espiral	0.5 mm	1-2	2-3 pasadas
EP + Espiral	0.2-0.5 mm	1-2	2-3 pasadas

1. Estampado



2. Espiral



❖ Acné

Técnica	Profundidad	Nivel de EP	Pasadas
Cara completa o Sólo en cicatrices	0.7-1.5 mm	1-2	2-3 pasadas
EP + Espiral	0.5 mm	1-2	2-3 pasadas

1. Estampado



2. Espiral



EP= Electroporación



DOSIS RECOMENDADA

Una ampolleta de 2ml por sesión.

RESETSKIN

PRECAUCIÓN:

El presionar durante los movimientos circulares puede causar heridas. No presione.