

ULTRAcel Q+

Programa de entrenamiento



Programa de entrenamiento ULTRAcel Q+

Información general

Queremos agradecer el haber adquirido su nuevo equipo de ULTRAcel Q+, un tratamiento integral ideal para el tratamiento de la flacidez de la piel y reducción de grasa corporal, estamos seguros de que cumplirá con todas sus expectativas.

Gran parte del éxito en el uso cotidiano de su equipo depende de un correcto entrenamiento, por lo cual le pedimos que lea detenidamente el presente documento.

Objetivos del programa

- Presentar un programa de entrenamiento teórico y práctico, para el uso y aprovechamiento adecuado de su equipo ULTRAcel Q+.
- Dar a conocer a los participantes la funciones, ventajas, alcances, limitaciones del equipo.
- Todos los participantes deberán dominar las funciones del ULTRAcel Q+:
 - Lifting Facial.
 - Countouring Facial.
 - Eliminación de papada.
 - Eliminación de adiposidades localizadas.
 - Eliminación de flacidez de la piel.

Conocimientos que obtendrán los participantes

- Será capaz de programar el equipo para los diferentes tratamientos y condiciones del paciente.
- Será capaz de analizar y valorar la condición actual de los probables pacientes, y si es que son candidatos para llevar a cabo un tratamiento con ULTRAcel Q+.
- Será capaz de informar al paciente sobre los resultados, alcances, riesgos y contraindicaciones que puede haber al someterse al tratamiento.
- Conocerá las características generales de la tecnología HIFU o FUS (Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad) y particulares de su equipo ULTRAcel Q+.

Conocimientos previos requeridos

Para el máximo aprovechamiento de su entrenamiento, es necesario cuente con los siguientes conocimientos:

- Anatomía y fisiología de la piel.
- Anatomía del sistema musculo aponeurótico superficial / SMAS.
- Salida de los nervios faciales.
- Los diferentes tipos de piel según Fitz Patrick para la correcta valoración del paciente.
- Conceptos básicos de la tecnología HIFU (Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad).

Para el mejor aprovechamiento del entrenamiento

Considere que usted ha hecho una gran inversión para la adquisición de su nuevo equipo ULTRAcel Q+, además que su paciente espera que usted le ofrezca los mejores resultados posibles con el mismo, por lo cual es importante que tome en cuenta las siguientes consideraciones para el presente programa de entrenamiento.

- El entrenamiento se lleva a cabo durante un día, aproximadamente de cuatro a cinco horas, por lo que es recomendable durante ese día el personal que vaya a ser entrenado no tenga citas durante ese tiempo.
- Parte del éxito del entrenamiento es que el personal que estará encargado del uso del equipo haya analizado detenidamente la información en el manual de usuario y todos los documentos entregados previos a la capacitación.
- Es muy importante contar con los pacientes requeridos para la práctica, de otra manera no será posible completar los conocimientos obtenidos en la sesión teórica.

Sesión teórica

10 minutos	Aclaración de preguntas sobre el manual de usuario y protocolo.
60 minutos	Teoría <ul style="list-style-type: none">• Introducción a la tecnología HIFU.• Características del Equipo ULTRAcel Q+.• Tecnología HIFU Dot y Lineal.• Indicaciones, contraindicaciones y selección del paciente.• Preparación del paciente.• Cuidados posteriores al tratamiento.• Seguimiento de su paciente.• Aplicaciones del ULTRAcel Q+:<ul style="list-style-type: none">○ Full Face para Lifting Facial.○ Rejuvenecimiento de mirada / Levantamiento de Cejas.○ Lifting del cuello y mejora del ángulo mandibular.○ Eliminación de papada.○ Eliminación de adiposidades localizadas.○ Lifting de glúteos y busto.• Combinación con otras tecnologías.• Detalles sobre pedidos de cartuchos. • Atención a preguntas.

Sesión práctica

Es muy importante que el paciente haya asistido a una valoración previa y llenado su consentimiento informado. Los pacientes que presenten alguna de las siguientes condiciones no podrán ser tratados.

- Cáncer.
- Mujeres embarazadas o lactantes.
- Herpes.
- Pacientes con enfermedad cardíaca o persona con un marcapasos cardíaco.
- Epiléptico.
- Lupus.
- Vitíligo.
- Infección, erupción.
- Inflamación.
- Capilares dilatados o venas varicosas.
- Tratamiento anticoagulante o enfermedad de la sangre o cardiopatía.
- Hinchazón de las glándulas.
- Anafilaxia hereditaria.
- Enfermedad de tiroides.
- Y otras enfermedades específicas.
- Antecedentes de lesiones del nervio facial.
- Enfermedades autoinmunes.
- Tratamiento con inmunosupresores.
- Enfermedades sistémicas activas o cutáneas que puedan alterar la cicatrización.
- Con trastornos hemorrágicos o con disfunción hemostática.

Desarrollo: Se llevará a cabo un tratamiento de muestra por la persona encargada del entrenamiento. El resto de los tratamientos serán realizados por los asistentes, supervisados por la persona encargada.

20 minutos	Introducción del equipo. <ul style="list-style-type: none">• Estructura:<ul style="list-style-type: none">○ Pantalla.○ Pieza de mano.○ Colocación de cartuchos.○ Soporte de cable y pieza de mano.○ Botón de paro de emergencia.○ Interruptor de encendido trasero y frontal.• Cómo encender y apagar su equipo.• Conexión y desconexión de pieza de mano.
20 minutos	Uso de la interfaz de usuario. <ul style="list-style-type: none">• Pantalla inicial y contraseña: 1111.• Contador de disparos: Restantes y actuales.• Información del cartucho.• Energía, Longitud y Espaciado.• Modo Auto.• Alarma de disparos.• Centro de mensajes.• Energía acumulada.• Botones de Espera / Tratamiento.

45 minutos	<p>Tratamiento 1: Full Face y Lifting Facial <i>Paciente necesario:</i> Paciente mujer u hombre que presente flacidez por envejecimiento facial.</p>
10 minutos	<p>Limpieza adecuada de los cartuchos</p>
45 minutos	<p>Tratamiento 2: Full Face y Lifting Facial <i>Paciente necesario:</i> Paciente mujer u hombre que presente flacidez por envejecimiento facial.</p>
30 minutos	<p>Tratamiento 3: Lifting de cuello y mejora del contorno mandibular <i>Paciente necesario:</i> Paciente mujer u hombre que presente flacidez en cuello o desee mejorar su contorno mandibular.</p>
25 minutos	<p>Tratamiento 4: Rejuvenecimiento de mirada / Lifting de ceja <i>Paciente necesario:</i> Paciente hombre o mujer que desee mejorar su contorno de ojos y cejas.</p>
20 minutos	<p>Tratamiento 5: Eliminación de adiposidades localizadas en tratamiento corporal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plicometría para definir el cartucho adecuado. • Tratamiento. <p><i>Paciente necesario:</i> Paciente que desee eliminar la grasa localizada en alguna de las áreas de abdomen, brazos, muslos.</p>
20 minutos	<p>Atención a preguntas</p>

Requisitos para la capacitación

Requisitos para la sesión teórica

Es recomendable contar con un área cómoda para llevar a cabo la sesión teórica. Para tal efecto tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Deberá de ser lo suficientemente amplia para alojar todas las personas que tomaran la capacitación.
- Contar con iluminación adecuada.

Requisitos para la sesión práctica

Comúnmente podrá utilizar un consultorio estándar o cubículo destinado para este tipo de procedimientos. Te pedimos de favor que cuentes con las siguientes consideraciones.

- Cubículo amplio y cómodo para los tratamientos.
- Iluminación agradable.
- Contar con camilla reclinable para tratamientos faciales y corporales.
- **Todos los pacientes deberán saber que el tratamiento que se les realizará será con el fin de entrenamiento.**

Material necesario

El siguiente material es necesario para llevar a cabo los tratamientos. Para la capacitación, la persona encargada llevará lo necesario para el correcto desarrollo del entrenamiento.

- Anestésico tópico.
- Protector solar CELLMULA.
- Crema reparadora CELLMULA.
- Espuma limpiadora CELLMULA.
- Microdacyn o algún tipo de antiséptico.
- Gel conductor.
- Guantes (no estéril).
- Cubre bocas.
- Abate lenguas.

El siguiente material, deberá de ser proporcionado por el médico:

- Analgésico oral (Ketorolaco, paracetamol).
- Esteroide tópico de alta potencia.
- Material desechable (sábanas, bikini y top).
- Bata para el paciente.
- Recipiente para agua.
- Esponjas faciales.
- Agua termal.
- Cinta de medir.

- Papel y pluma.
- Cámara fotográfica.

En medida que cumpla con los requisitos antes señalados, el desarrollo del entrenamiento se llevara a cabo de una manera coordinada y adecuada a los objetivos del programa.