


### Contraindicaciones

- Mujeres embarazadas o lactando.
- Pacientes que se hayan expuesto al sol en el área a tratar en los últimos 20 días.
- Piel foto sensible o con urticaria solar.
- Pacientes tomando medicamentos foto-sensibles (ver tabla anexa).
- Pacientes con diabetes.
- Pacientes con problemas severos en la piel.
- Pacientes que utilicen marcapasos o desfibriladores.
- Pacientes con cáncer o enfermedades terminales.
- Cuando el paciente tenga expectativas no realistas.

### Tratamiento posterior para prevenir pigmentación post-inflamatoria

- Enfríe la zona tratada con alguna mascarilla refrescante o paquetes enfriadores.
- Particularmente enfríe las áreas con eritema severo por al menos 20 minutos.
- Si hay eritema intenso u oscuro, es ampliamente recomendable que después de la depilación aplique una crema de esteroides para prevenir quemaduras.

### Haga buen contacto con la piel

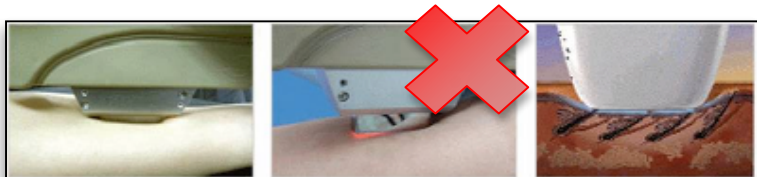

### Pigmentaciones

#### Photo Facial

Número de sesiones: 10.  
Tiempo entre sesiones: 2 semanas sin pecas o lentigos.  
4 semanas con pecas y/o lentigos.

P-Facial I (Con pecas)	Fototipo I-II	Fototipo III	Fototipo IV	Fototipo V
Filtro	560 nm	590 nm	590 nm	590 nm
Nivel	27	27	25	23
P-Facial II (Sin pecas)	Fototipo I-II	Fototipo III	Fototipo IV	Fototipo V
Filtro	560 nm	590 nm	590 nm	590 nm
Nivel	35	35	33	31

#### Lentigos

Número de sesiones: 4.  
Tiempo entre sesiones: 1 mes.

Lentigos	Fototipo I-II	Fototipo III	Fototipo IV	Fototipo V
Filtro	530 nm	560 nm	560 nm	590 nm
Nivel	20	20	18	26

#### Melasma

Número de sesiones: 6.  
Tiempo entre sesiones: 1 mes.

Melasma	Fototipo I-II	Fototipo III	Fototipo IV	Fototipo V
Filtro	640 nm	640 nm	640 nm	640 nm
Nivel	24	21	19	18

### Cell Toning

Número de sesiones: 10.  
Tiempo entre sesiones: 1 semana.  
Distancia del filtro a la piel: 2 a 5 mm.

Filtro	Energía	Duración de pulso	Descanso de pulso	Tiempo total de pulso
560nm o 640nm	8 a 14 Joules	0.3	0.7	1

### Lesiones vasculares

#### Telangiectasias faciales y Rosácea / Eritema Difuso

Número de sesiones: 5.  
Tiempo entre sesiones: 1 mes.  
Distancia de filtro a la piel: Contacto directo.

Telangiectasias faciales	Fototipo I-II	Fototipo III	Fototipo IV	Fototipo V
<b>Filtro</b>	530(s) nm	560 nm	560 nm	590 nm
<b>Nivel</b>	12 - 17	27	25	27
Eritema difuso	Fototipo I-II	Fototipo III	Fototipo IV	Fototipo V
<b>Filtro</b>	530(s) nm	530(s) nm	590 nm	590 nm
<b>Nivel</b>	16 - 19	14	30 - 32	28

### Depilación

Número de sesiones: 10.  
Tiempo entre sesiones: 6 semanas.  
Distancia de filtro a la piel: Contacto directo.

Acné	Fototipo I-II	Fototipo III	Fototipo IV	Fototipo V
<b>Filtro</b>	700 nm	700 nm	700 nm	800 nm
<b>Nivel</b>	27 - 29	22 - 26	22 - 26	18 - 21

### Acné

#### Acné

Número de sesiones: 10.  
Tiempo entre sesiones: 1 semana.

Acné	Fototipo I-II	Fototipo III	Fototipo IV	Fototipo V
<b>Filtro</b>	420(s) nm	420(s) nm	420(s) nm	420(s) nm
<b>Nivel</b>	14	12	11	9

### Photo Shower

Número de sesiones: 10.  
Tiempo entre sesiones: 1 semana.  
Distancia del filtro a la piel: 2 a 5 mm.

Filtro	Función
<b>420(s)</b>	Para lograr un gran rango de absorción de la Porfirina, ideal para tratar el acné.
<b>560</b>	Mejora el estado del acné y ayuda a disminuir su eritema cuando es severo. Puede ser utilizado para tratamiento de fotorejuvenecimiento.
<b>700</b>	Para fotorejuvenecimiento, logra mejorar la calidad de la piel, su textura y firmeza.