

Guía rápida de parámetros para Cellec V

Generales

Photo Shower			
Filtro	420(S)	560	700
Fluencia (J/cm ²)	3	5	4
Frecuencia	4Hz	3Hz	4Hz
Tiempo entre sesiones: 1 semana para Acné. 2 semanas para rejuvenecimiento de la piel.			
Filtro 420(S) para acné en cualquier fototipo. Filtro 560 para rejuvenecimiento en pieles I, II y III. Filtro 700 para rejuvenecimiento en pieles IV y V.			

Cell-Toning			
Filtro	550(S)	560	640
Duración de Pulso	0.7		
Espacio de pulso	0.3		
Tiempo total	10		
Fluencia (J/cm ²)	14~16	15~20	15~20
Tiempo entre sesiones: 1 semana.			

HR	I - II	III	IV	V
Filtro	700			
Duración de Pulso	20	30	30	30
Espacio de pulso	-	-	-	-
Fluencia (J/cm ²)	27~29	22~26	22~26	18~21
Tiempo entre sesiones: 4 a 6 semanas.				

Guía rápida de parámetros para Cellec V

Lesiones vasculares

FTL	I - II	III	IV	V
Filtro	500(S) / 530(S)	550(S) / 560	560	590
Duración de Pulso	2.4 / 4.4	2.4 / 4.4	2.4 / 4.4	2.4 / 4.4
Espacio de pulso	20	20	20	20
Fluencia (J/cm ²)	12~17	16 / 25~27	25~27	27
Tiempo entre sesiones: 1 mes.				

RSC	I - II	III	IV	V
Filtro	530(D)	530(D)	530(D)	530(D)
Duración de Pulso	8.8	8.8	8.8	8.8
Espacio de pulso	-	-	-	-
Fluencia (J/cm ²)	20~22	18~20	16~18	14~16
Tiempo entre sesiones: 1 mes.				

ACN	I - II	III	IV	V
Filtro	420(S)	420(S)	420(S)	420(S)
Duración de Pulso	2.4 / 4.4	2.4 / 5.0	2.8 / 5.4	2.8 / 5.4
Espacio de pulso	20	20	30	40
Fluencia (J/cm ²)	14	12	11	9
Tiempo entre sesiones: 2 semanas.				

Guía rápida de parámetros para Cellec V

Lesiones pigmentadas

P-FCL	I - II	III	IV	V
Filtro	560	560	590	590
Duración de Pulso	2.4 / 4.0	2.4 / 4.0	2.4 / 4.0	2.4 / 4.0
Espacio de pulso	20	20	20	20
Fluencia (J/cm ²)	23~27	20~25	23~27	20~25
Tiempo entre sesiones: 2 semanas sin pecas o lentigos. 4 semanas si hay pecas o lentigos.				

LNTG	I - II	III	IV	V
Filtro	550(S)	560	560	590
Duración de Pulso	3.6	4.0	4.0	3.0 / 3.0
Espacio de pulso	-	-	-	30
Fluencia (J/cm ²)	10	18~20	18~20	26
Tiempo entre sesiones: 1 mes.				

MLSM	I - II	III	IV	V
Filtro	590	640	640	640
Duración de Pulso	3.0 / 4.4	3.2 / 4.8	3.2 / 4.8	3.5 / 5.3
Espacio de pulso	20	20	20	30
Fluencia (J/cm ²)	26	24	19~21	18
Tiempo entre sesiones: 1 mes.				