

# cellec v

Programa de entrenamiento



# Programa de entrenamiento Cellec V

## Información general

Queremos agradecer el haber adquirido su nuevo equipo de Cellec V, un avanzado equipo de Luz Pulsada Intensa.

Su tecnología lo hace ideal para diversos tratamientos de la piel, pigmentaciones, vasculares, fotorejuvenecimiento, acné e incluso la foto depilación. Cuenta con varias longitudes de onda para cada uno de estos tratamientos.

## Objetivos del programa

- Presentar un programa de entrenamiento teórico y práctico, para el uso y aprovechamiento adecuado de su equipo Cellec V.
- Dar a conocer a los participantes la funciones, ventajas, alcances, limitaciones del equipo.

## Conocimientos que obtendrán los participantes

- Será capaz de programar el equipo para los diferentes tratamientos y condiciones del paciente.
- Será capaz de analizar y valorar la condición actual de los probables pacientes, y si es que son candidatos para llevar a cabo alguno de los tratamientos con Cellec V.
- Será capaz de informar al paciente sobre los resultados y alcances que pueda ofrecer al someterse a cualquiera de los tratamientos de Cellec V.
- Conocerá los posibles riesgos y contraindicaciones en el tratamiento con Cellec V.

## Conocimientos previos requeridos

Para el máximo aprovechamiento de su entrenamiento, es necesario cuente con los siguientes conocimientos:

- Los diferentes tipos de piel según Fitzpatrick para correcta valoración del paciente.
- Los diferentes tipos de pigmentaciones en la piel.
- Los diferentes problemas vasculares en la piel.
- Tipo de vello (Colores, grosor, densidad).
- Etapas de crecimiento del vello.

## Para el mejor aprovechamiento del entrenamiento

Considere que usted ha hecho una gran inversión para la adquisición de su nuevo equipo Cellec V, además que su paciente espera que usted le ofrezca los mejores resultados posibles con el mismo, por lo cual es importante que tome en cuenta las siguientes consideraciones para el presente programa de entrenamiento.

- El entrenamiento se lleva a cabo durante un día, aproximadamente de cinco a seis horas, por lo que es recomendable durante ese día el personal que vaya a ser entrenado no tenga citas durante ese tiempo.
- Parte del éxito del entrenamiento es que el personal que estará encargado del uso del equipo haya analizado detenidamente la información en el manual de usuario y todos los documentos entregados previos a la capacitación.
- Es muy importante contar con los pacientes requeridos para la práctica, de otra manera no será posible completar los conocimientos obtenidos en la sesión teórica.

## Sesión teórica

10 minutos	Aclaración de preguntas sobre el manual de usuario y protocolo.
20 minutos	<b>Teoría de acción de Cellec V.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tecnología de Luz Pulsada Intensa.</li><li>• Tratamientos Vasculares a tratar con Cellec V.</li><li>• Tratamientos de Pigmentación a tratar con Cellec V.</li><li>• Filtros disponibles.</li><li>• Características de los filtros (S).</li><li>• Características del filtro (D).</li><li>• Indicaciones y contraindicaciones.</li><li>• Selección de pacientes.</li><li>• Preparación del paciente.</li><li>• Cuidados de pacientes post tratamiento.</li><li>• Seguimiento del paciente.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Atención a preguntas.</li></ul>

## Sesión práctica

Es muy importante que el paciente haya asistido a una valoración previa y llenado su consentimiento informado. Las siguientes se consideran contraindicaciones para el tratamiento, si el candidato presente alguna de las siguientes condiciones, no podrá ser tratado.

- Pacientes que se hayan expuesto al sol en un lapso de 15 días previos.
- Pacientes que vayan a tomar el sol en los siguientes tres días.
- Pacientes bronceados.
- Tomando medicamentos fotosensibles.
- Pacientes con ataques epilépticos
- Pacientes con embarazo o lactando.
- Pacientes con diabetes.
- Pacientes con alergias en la piel o herpes.
- En estado febril.
- No deberá portar maquillaje, lociones, desodorantes o cremas en zonas a tratar.
- No presentar depilado con método de arranque (pinzas, cremas de depilación o cera).

**Los pacientes para depilación deberán presentarse rasurados de una noche antes, preferentemente que el día del tratamiento sea expuesta exclusivamente la punta del vello.**

Desarrollo: Se llevará a cabo un tratamiento de muestra por la persona encargada del entrenamiento. El resto de los tratamientos serán realizados por los asistentes, supervisados por la persona encargada.

30 minutos	<p><b>Introducción del equipo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pantalla.</li> <li>○ Pieza de mano y su soporte.</li> <li>○ Interruptor de encendido.</li> <li>○ Botón de paro de emergencia.</li> <li>○ Pieza de mano y ranura multi-filtros.</li> <li>○ Filtros disponibles.</li> </ul> </li> <li>• Conexión y desconexión de la pieza de mano.</li> <li>• Insertando los filtros correctamente.</li> <li>• Carga de agua.</li> <li>• Cómo encender y apagar su equipo.</li> <li>• Uso de la interfaz de usuario: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menú V Mode.</li> <li>○ Menú P Mode.</li> <li>○ Menús: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ P-FCL: Photo facial.</li> <li>▪ C-Ton: Cell Toning.</li> <li>▪ LNTG: Lentigos.</li> <li>▪ FTL: Telangiectasias Faciales.</li> <li>▪ RSC: Rosácea.</li> <li>▪ ACN: Acné.</li> <li>▪ Photo Shower.</li> <li>▪ MSLSM: Melasma.</li> <li>▪ HR: Depilación.</li> </ul> </li> <li>○ Configuración de Color de piel.</li> <li>○ Contador de disparos.</li> <li>○ Número de pulsos dentro de un disparo y tiempos de relajación térmica entre pulsos.</li> <li>○ Fluencia.</li> <li>○ Configuración del sistema de enfriamiento.</li> <li>○ Configuración especial del Modo Cell Toning.</li> <li>○ Configuración especial del Modo Photo Shower.</li> <li>○ Botón de INICIO / DETENER.</li> </ul> </li> </ul>
15 minutos	<p><b>Preparación del paciente de depilación.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección ocular.</li> <li>• Revisión del rasurado.</li> <li>• Evaluación de las características de la piel y el vello.</li> <li>• Aplicación de gel.</li> </ul> <p>Se requiere alguno de los pacientes que vayan a ser depilados.</p>
45 minutos	<p><b>Tratamiento 1: Depilación de brazos o abdomen</b></p> <p><i>Paciente necesario: Paciente mujer u hombre que desee depilarse alguna de las zonas mencionadas.</i></p>

15 minutos	<b>Limpieza del equipo y paciente posterior al tratamiento</b>
15 minutos	<p><b>Preparación del paciente para los tratamientos de la piel.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión y evaluación de las condiciones de la piel.</li> <li>• Aplicación de gel, si aplica.</li> </ul> <p>Se requiere alguno de los pacientes que vayan a ser tratados para problemas de la piel.</p>
20 minutos	<p><b>Tratamiento 2: Tratamiento de Lesiones Vasculares</b></p> <p><i>Paciente necesario: Paciente hombre o mujer que desee tratarse problemas de Rosácea o Telangiectasias faciales.</i></p>
20 minutos	<p><b>Tratamiento 3: Tratamiento de Lesiones Vasculares</b></p> <p><i>Paciente necesario: Paciente hombre o mujer que desee tratarse problemas de Rosácea o Telangiectasias faciales.</i></p>
20 minutos	<p><b>Tratamiento 4: Tratamiento de Lesiones Pigmentadas</b></p> <p><i>Paciente necesario: Paciente hombre o mujer que desee tratarse Lentigos o Melasma.</i></p>
20 minutos	<p><b>Tratamiento 5: Tratamiento de Lesiones Pigmentadas</b></p> <p><i>Paciente necesario: Paciente hombre o mujer que desee tratarse Lentigos o Melasma.</i></p>
30 minutos	<p><b>Tratamiento 6: Tratamiento Photo Facial</b></p> <p><i>Paciente necesario: Paciente hombre o mujer que desee mejorar el color, tono y textura de su piel.</i></p>
30 minutos	<p><b>Tratamiento 7: Tratamiento Cell Toning</b></p> <p><i>Paciente necesario: Paciente hombre o mujer que desee mejorar la condición de su PIH o melasma.</i></p>
20 minutos	<p><b>Tratamiento 8: Tratamiento Photo Shower</b></p> <p><i>Paciente necesario: Paciente hombre o mujer que desee mejorar su condición de acné, o mejorar su coloración y tono de la piel.</i></p>
15 minutos	<p><b>Tratamiento 9: Tratamiento de Acné</b></p> <p><i>Paciente necesario: Paciente hombre o mujer que desee mejorar su condición de acné.</i></p>
20 minutos	Atención a preguntas

## Requisitos para la capacitación

### Requisitos para la sesión teórica

Es recomendable contar con un área cómoda para llevar a cabo la sesión teórica. Para tal efecto tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Deberá de ser lo suficientemente amplia para alojar todas las personas que tomaran la capacitación.
- Contar con iluminación adecuada.

### Requisitos para la sesión práctica

Comúnmente podrá utilizar un consultorio estándar o cubículo destinado para este tipo de procedimientos. Te pedimos de favor que cuentes con las siguientes consideraciones.

- Cubículo amplio y cómodo para los tratamientos.
- Iluminación agradable.
- Contar con camilla reclinable para tratamientos faciales y corporales.
- **Todos los pacientes deberán saber que el tratamiento que se les realizará será con el fin de entrenamiento.**

## Material necesario

El siguiente material es necesario para llevar a cabo los tratamientos. Para la capacitación, la persona encargada llevará lo necesario para el correcto desarrollo del entrenamiento.

- Protector solar CELLMULA.
- Limpiador facial Vital Mild Cleansing Foam CELLMULA.
- Crema reparadora True Repair Cream CELLMULA.
- Mascarilla Vital Hydra Soothing Mask CELLMULA.
- Microdacyn o algún tipo de antiséptico.
- Guantes (no estéril).
- Cubre bocas.
- Abate lenguas.

El siguiente material, deberá de ser proporcionado por el médico:

- Agua termal.
- Crema de aloe vera.
- Rastrillos.
- Crema de esteroides para quemaduras.

En medida que cumpla con los requisitos antes señalados, el desarrollo del entrenamiento se llevara a cabo de una manera coordinada y adecuada a los objetivos del programa.