

Tabla de referencia de parámetros de depilación

Para los primeros 3 a 4 tratamientos, y para esos pacientes que nunca han tenido un tratamiento de depilación, por favor use los siguientes parámetros para vello denso o grueso.

Modo de Operación	Área de tratamiento	Tipo de piel I Blanca		Tipo de piel II Beige claro		Tipo de piel III Beige		Tipo de piel IV Café claro		Tipo de piel V Café moderado		Tipo de piel VI Café obscura y Negra	
		Energía total	Energía emitida y disparos	Energía total	Energía emitida y disparos	Energía total	Energía emitida y disparos	Energía total	Energía emitida y disparos	Energía total	Energía emitida y disparos	Energía total	Energía emitida y disparos
Modo Rápido	Brazos, pierna pecho, espalda vello delgado o escaso	5,800 a 6,500 J Área de 5x10cm	9 o 10Hz 10J a 12J 320 a 360 disparos	4,750 a 5,800 J Área de 5x10cm	9 o 10Hz 10J a 12J 265 a 320 disparos	4,000 a 4,750 J Área de 5x10cm	8 o 10Hz 9J a 10J 225 a 265 disparos	3,600 a 4,750 J Área de 5x10cm	8 o 9Hz 9J a 10J 200 a 265 disparos	3,000 a 3,600 J Área de 5x10cm	6 o 7Hz 7J a 9J 215 a 250 disparos	2,000 a 2,400 J Área de 5x10cm	5 o 6Hz 6J a 8J 160 a 190 disparos
	Brazos, pierna pecho, espalda Vello grueso, obscuro, denso	4.61-5.18 J/50 cm ²	8 o 9Hz 9J a 11J 250 a 290 disparos	3,500 a 4,600 J Área de 5x10cm	8 o 9Hz 8J a 10J 190 a 255 disparos	3,200 a 3,800 J Área de 5x10cm	7 o 9Hz 7J a 8J 225 a 265 disparos	2,800 a 3,800 J Área de 5x10cm	7 a 9Hz 7J a 8J 200 a 265 disparos	2,500 a 2,900 J Área de 5x10cm	6 o 7Hz 6J a 8J 195 a 230 disparos	1,600 a 1,900 J Área de 5x10cm	5 o 6Hz 5J a 7J 125 a 155 disparos
Modo Libre	Axila	6,350 a 9,100 J Por lado	3 o 5Hz 17J a 18J 195 a 280 disparos	6,000 a 8,000 J Por lado	3 o 5Hz 17J a 18J 185 a 255 disparos	5,750 a 7,200 J Por lado	3 o 5Hz 15J a 16J 215 a 265 disparos	4,700 a 5,500 J Por lado	3 o 5Hz 11J a 13J 215 a 255 disparos	4,700 a 5,150 J Por lado	3 o 5Hz 10J a 12J 260 a 290 disparos	3,300 a 4,200 J Por lado	3 a 5Hz 9J a 11J 185 a 230 disparos

Tabla de referencia de parámetros de depilación

Después de 3 a 4 tratamientos, cuando el vello llega a ser delgado y escaso, se sugiere seleccionar el modo de programación libre (alta energía y baja frecuencia).

Operar por estampado o movimientos lentos al hacer el resto de los tratamientos.

Parte	Piel	Condición del vello	Frecuencia (Hz)	Pases por tratamiento	Tipo de piel I Blanca (J/cm ²)	Tipo de piel II Beige ligera (J/cm ²)	Tipo de piel III Beige (J/cm ²)	Tipo de piel IV Café ligera (J/cm ²)	Tipo de piel V Café moderada (J/cm ²)	Tipo de piel VI Negra (J/cm ²)
Brazos		Escaso, delgado	1-2	2-3 pases	22-27	20-25	18-23	16-21	14-19	12-17
Piernas		Escaso, delgado	1-2	2-3 pases	22-34	20-32	18-30	16-28	14-26	12-24
Abdomen		Escaso, delgado	1-2	2-3 pases	16-20	14-18	12-16	10-14	8-12	6-10
Pecho (hombres)		Escaso, delgado	1-2	2-3 pases	14-19	12-17	10-15	8-13	6-11	5-10
Axila		Escaso, delgado	1-2	2-3 pases	21-26	19-24	17-22	15-18	13-16	11-14
Labios		-	1	2-3 pases	22-29	20-27	18-25	16-23	14-21	12-19
Barba		-	1-2	2-3 pases	16-24	14-22	12-20	10-18	8-16	8-14
Línea de cabello		-	1	2-3 pases	19-24	17-22	15-20	13-18	11-16	9-14
Bikini		Escaso, delgado	1-2	2-3 pases	16-29	14-27	12-25	11-24	10-23	8-21
		Denso, grueso	1-2	2-3 pases	12-18	10-16	8-15	7-14	6-13	5-12
Dedos		Escaso, delgado	1	2-3 pases	24-39	22-37	20-35	18-33	16-31	14-29
		Denso, grueso	1	2-3 pases	20-28	18-26	16-24	14-22	12-20	10-19
Pies		Escaso, delgado	1	2-3 pases	22-37	20-35	18-33	16-31	14-29	12-27
		Denso, grueso	1	2-3 pases	17-23	15-21	13-19	11-17	9-15	7-13

Guía de tratamiento de depilación

Contraindicaciones

No deberá de realizar el tratamiento a pacientes con las siguientes condiciones:

- Tiene antecedentes de cicatrización queloide y enfermedades de fotosensibilidad.
- Tiene infección de la piel o herpes simple. Historia en el área de tratamiento.
- Ha tomado otros métodos de depilación, no láser, en una lapso de 6 semanas hacia atrás.
- Es alérgico a las hidroquinonas u otros blanqueadores.
- Mujeres embarazadas.
- Pacientes con tienen tumor maligno.
- Pacientes con enfermedad cardíaca.
- Pacientes con presión arterial alta.
- Pacientes que hayan tomado en los últimos seis meses, ácido de vitamina A (Isotretinoína).
- Pacientes que hayan tomado el sol el último mes.
- **Tenga precaución en pacientes con fototipos V y VI.**
- No tratar en vello blanco, no tiene efecto.

Antes del tratamiento

1. Idealmente el paciente deberá rasurar el área una noche antes, de lo contrario rasure antes de comenzar.
2. No mire directamente al láser.
3. Para pacientes con temor al tratamiento láser, use energías bajas al inicio.
4. Asegúrese de colocar los lentes protectores tanto para el paciente como para el operador.

Durante el tratamiento

1. Es normal que la piel morena sienta ardor durante el tratamiento, use energías bajas y asegúrese de que el ardor no sea intenso.
2. Cubra el cabello de las áreas que no deben de recibir tratamiento.
3. Si el paciente presenta fotosensibilidad, deberá suspender el tratamiento y evitar que el paciente se rasque con la mano.
4. Si la piel presenta un enrojecimiento intenso, unte un ungüento para quemaduras.
5. Unte gel refrescante o aplique hielo para un enrojecimiento moderado.
6. Las reacciones de la piel pueden retrasarse en la piel oscura.

Después del tratamiento

1. Observe si hay reacciones cutáneas anormales.
2. Enfríe el área de tratamiento y limpie la piel.

Cuidados post-tratamiento

1. Después de la depilación láser, se sugiere evitar nadar, bañarse con agua caliente y el sauna, etc., durante el primer día.
2. Evitar la irradiación ultravioleta después de la depilación láser, evitar la exposición al sol y utilizar protector solar por al menos 10 días.
3. Después de la depilación láser, la piel aparece seca y urticante, se sugiere untar una crema reparadora o hidratante.
4. Es normal que alrededor de los poros se vea enrojecimiento, evite rascar, el efecto desaparecerá en un par de días.
5. Se sugiere consumir alimentos con Vitamina C posterior al tratamiento.

Coolite Evo^{ES}

Tabla de parámetros de referencia para Rejuvenecimiento Facial

Referencia de parámetros de funcionamiento

Enfriamiento: Nivel 2

SR	Tipo de piel I Blanca	Tipo de piel II Beige claro	Tipo de piel III Beige	Tipo de piel IV Café claro	Tipo de piel V Café moderado	Tipo de piel VI Café oscuro y Negra
Mejillas	15-19J, 54-104ms, 4Hz, 150-200 disparos/lado	13-17J, 48-97ms, 4Hz, 150-200 disparos/lado	8-12J, 30-72ms, 3-4Hz, 150-200 disparos/lado			
	Las partes clave como arrugas y poros se pueden tratar nuevamente 1 o 2 veces más en modo disparo por disparo.					
Frente, Nariz	17-23J, 61-125ms, 1Hz, 3-4 pases	15-21J, 55-119ms, 1Hz, 3-4 pases	10-15J, 38-89ms, 1Hz, 3-4 pases			
	La frente y nariz pueden ser tratadas continuamente, en dos pases, de acuerdo con la tolerancia y reacción de la piel del paciente					

Coolite Evo^{ES}

Tabla de parámetros de referencia para Rejuvenecimiento Facial

Referencia de parámetros de funcionamiento

Enfriamiento: Nivel 2

Selección de energía:	Nariz → frente → mejillas. Selección de energía se hace comenzando del nivel más bajo al más alto, y en base a la sensación del paciente. Para la piel sensible, se recomienda seleccionar un ancho de pulso largo.
Sesiones:	3 a 5 sesiones.
Intervalo:	De 3 a 4 semanas.
Apto para:	Flacidez facial, envejecimiento, amarillamiento, piel opaca, pérdida de brillo, piel áspera, líneas finas de expresión y poros abiertos.
Método de operación:	Preste atención a la protección de la línea del cabello y los ojos.
Mejillas:	La punta de la pieza de mano debe estar sobre la piel y seguir la textura de la piel de abajo hacia arriba, y de adentro hacia afuera.
Frente, Nariz:	La punta de la pieza debe estar sobre la piel y seguir la textura de la piel en toda la cara, con movimientos de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, desde un punto a otro. No empalme o dispare al aire durante la operación.