

DermaStampen

avanzado sistema de micro-Punciones

110 V



Inicio del tratamiento

1. Coloque la punta.
2. Ajuste la profundidad deseada.
3. Conecte el cable de alimentación a la Derma Stampen y posteriormente a la toma de corriente.
4. Gire el switch de encendido y ajuste la velocidad deseada (Velocidad máxima 7,600 RPM).
5. Comience el tratamiento.

Video entrenamiento
en nuestro canal de Youtube



Profundidades y tratamientos

- | | |
|-------|--|
| 0.5mm | Rejuvenecimiento y líneas finas de expresión. |
| 1.0mm | Arrugas, flacidez, poros y acné. |
| 1.5mm | Pliegues, flacidez y cicatrices superficiales. |
| 2.0mm | Cicatrices profundas y estrías. |

Puede utilizar la Derma Stampen de forma individual o bien con combinación con otros productos para mejorar las condiciones de la piel.

Estos valores son los recomendados y que funcionan en la mayoría de los casos, no obstante, puede modificarlos de acuerdo a la calidad y tipo de piel de su paciente.

Contraindicaciones

1. Pacientes con enfermedades agudas.
2. Pacientes con problemas de coagulación.
3. Paciente con alergías.
4. Pacientes con melanosis en cara.
5. Pacientes con temperatura.
6. Pacientes con enfermedades crónicas.
7. Pacientes tomando medicamentos.
8. Pacientes menores de 12 años.