

DermaStampen[®]

avanzado sistema de micro-Punciones

110 V



Inicio del tratamiento

La primera carga de baterías debe de ser tres horas, las cargas siguiente de una hora. La batería esta cargada cuando la luz verde enciende.

1. Coloque la punta.
2. Ajuste la profundidad deseada.
3. Presione por dos segundos el botón de encendido para iniciar la Derma Stampen WL.
4. Presione el mismo botón varias veces para definir la velocidad deseada.
5. Comience el tratamiento.

Video entrenamiento
en nuestro canal de Youtube



Profundidades y tratamientos

- | | |
|-------|--|
| 0.5mm | Rejuvenecimiento y líneas finas de expresión. |
| 1.0mm | Arrugas, flacidez, poros y acné. |
| 1.5mm | Pliegues, flacidez y cicatrices superficiales. |
| 2.0mm | Cicatrices profundas y estrías. |

Puede utilizar la Derma Stampen WL de forma individual o bien con combinación con otros productos para mejorar las condiciones de la piel.

Estos valores son los recomendados y que funcionan en la mayoría de los casos, no obstante, puede modificarlos de acuerdo a la calidad y tipo de piel de su paciente.

Contraindicaciones

1. Pacientes con enfermedades agudas.
2. Pacientes con problemas de coagulación.
3. Paciente con alergías.
4. Pacientes con melanosis en cara.
5. Pacientes con temperatura.
6. Pacientes con enfermedades crónicas.
7. Pacientes tomando medicamentos.
8. Pacientes menores de 12 años.