

Edge fractional

Manual de mantenimiento preventivo



Mantenimiento preventivo para equipo Edge Fractional

El equipo Edge Fractional requiere de algunos aspectos de mantenimiento preventivo en sus piezas de mano muy sencillos de realizar por parte de los usuarios de la máquina para mantenerlas en buenas condiciones y en correcto funcionamiento.

Se le recuerda que realizando este proceso de mantenimiento en el periodo marcado, su equipo se mantendrá siempre en óptimas condiciones para trabajar.

Capítulo 1 – Limpieza de la pantalla / Exterior del equipo

Si va a guardar su equipo, límpielo antes ya que pudiera estar contaminado durante los tratamientos o por medicamentos.

Humedezca un paño suave en un detergente no corrosivo como fluidos 99% etanol o alcohol isopropílico, limpie la pantalla primero y después el cuerpo del equipo de forma suave y cuidadosa.

Hágalo una segunda vez con otro paño limpio.



No aplique el detergente o líquido limpiador directamente sobre la pantalla o equipo ya que se puede dañar.


Capítulo 2 - Limpieza de pieza de mano fraccionada

Con el fin de mantener en buen estado y buena emisión de energía de la pieza de mano fraccionada es necesario realizar el siguiente procedimiento:

1. Al finalizar cada tratamiento es necesario realizar una limpieza del lente en la pieza de mano fraccionada ya que si no se realiza puede haber pérdida de energía o incluso no generar la figura deseada.

Utilizando un liquido limpiador de lentes sin alcohol se rocía en el lente y con un hisopo realizar la limpieza tal y como lo muestra la imagen.

2. Si permanecen residuos de contaminantes puede retirarlos con un hisopo seco.

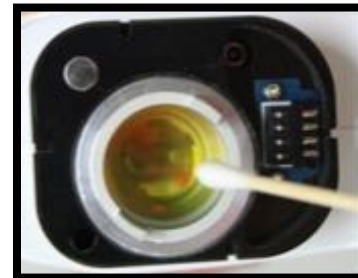

Capítulo 3 – Limpieza de puntas de acrílico para modo fraccionado

Al igual que las piezas de mano, las puntas también se pueden llegar a ensuciar debido al humo generado durante el tratamiento para lo cual se explica un proceso de limpieza para ellas.

1. Se rocía un hisopo con antiséptico ó alcohol.
2. Se limpia toda la zona plástica de la punta con el fin de remover impurezas que se hayan adherido a ella durante el tratamiento en especial la zona que tiene contacto con el paciente.
3. Con un paño húmedo puede hacer una limpieza más profunda.

Se debe realizar después de cada tratamiento.



Capítulo 4 – Limpieza de pieza de mano quirúrgica

La pieza de mano al igual que las demás piezas de mano puede llegar a perder energía debido a suciedad dentro del lente es por esto que se presenta a continuación el proceso de limpieza de esta pieza de mano.

1. El proceso es similar a la limpieza de la pieza de mano fraccionada con la diferencia de que el líquido se rocía en un hisopo y no directamente el lente ya que el lente es mucho más pequeño en esta pieza de mano.

