

## Parámetros estándar

| Indicación                 | Watts | Energía de pulso mJ | Densidad % | Número de repeticiones (Stacking) | Tamaño de spot mm | Técnica   |
|----------------------------|-------|---------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|---|
| Dentro de la vagina        | 30    | 90-120              | 0.6%       | 2-3                               | 8 x 8             | Se recomiendan de <b>dos a tres pasadas</b> en cada área.   |
| En la entrada de la vagina | 30    | 50                  | 0.6%       | 2                                 | 8 x 8             | Puede tratar sin anestesia o bien con una aplicación de anestesia tópica por 10 minutos. Inmediatamente después del tratamiento aplique una crema con función protectora de la membrana mucosa y no utilice ningún otro producto para limpieza pues podría irritar la zona. |

