

## Parámetros estándar

Tratamientos	Tamaño del haz µm	Energía máxima Watts	Energía del pulso mJ	Densidad puntos/cm <sup>2</sup>
Rejuvenecimiento de la piel	Poros grandes y líneas finas (Peri orbital)	20	10-30	150-200
	Flacidez de la piel y arrugas profundas	20	20-30	150-200
	Tono de piel irregular (Manchas y telangiectasias)	30	10	200-300
	Fuera de la cara (Pecho, cuello y manos)	30	10-20	100
	Cicatrices de acné	30	20-60	50-200
Cicatrices	Cicatrices por quemaduras	30	30-50	50
	Cicatrices hipertroficas, queloides	30	10	200
	Cicatrices atróficas lineales	30	20-30	200-300
	Estrías	30	20-40	200-300
	Skin resurfacing fraccionado ablativo	800	30	Al menos 60

## Parámetros suaves (Menos agresivos que los estándar)

Es recomendado que los nuevos usuarios comiencen con estos parámetros.

Tratamientos	Tamaño del haz µm	Energía máxima Watts	Energía del pulso mJ	Densidad puntos/cm <sup>2</sup>	Pases
Rejuvenecimiento de la piel	Poros grandes y líneas finas (Peri orbital)	Edge Pulse	3.6 a 5.4 (0.10 a 0.15ms)	100 a 144	1
	Flacidez de la piel y arrugas profundas	30	14 a 18	81 a 100	1
	Tono de piel irregular (Manchas y telangiectasias)	30	6 a 10	100 a 121	1
	Fuera de la cara (Pecho, cuello y manos)	30	6	100	1
	Cicatrices de acné	30	22 a 26	100	1 a 2
Cicatrices	Cicatrices de acné	Edge Pulse	7.2 a 9 (0.20 a 0.25ms)	100	1 a 2
	Cicatrices en general	30	26 a 35	100 a 144	1 a 2