

# Protocolo de Hydra Beauty II (Para equipos adquiridos a partir de 2018, con pantalla LCD)


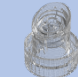

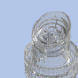


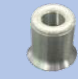
Total: 12 pasos, Tiempo de tratamiento: 50 minutos

- Asegúrese de probar la reacción a cada una de las soluciones a ambos lados del cuello, antes de iniciar el procedimiento.
- **Es muy importante que utilice guantes al menos durante los pasos 1 al 6, o preferentemente durante todo el procedimiento.**

Paso	Material	Punta	Flujo	Vacuum	Pases	Tiempo (min)	Descripción
1	Gel limpiador Desmaquillante					5 min	Use una crema o gel dermolimpiador para limpiar toda la cara.
2	Hydra Beauty <b>Hydra Beauty S1</b>	 Grande	1	1	2	5 min	<b>Aplique la solución 1 con Hydra Beauty</b> Divida la cara en cuatro cuadrantes y limpie la cara en el orden adecuado, desde el mentón a mejillas, y la frente. Frote con las manos para lograr una absorción uniforme. <b>Mentón:</b> De abajo hacia arriba / <b>Mejilla:</b> Desde el centro hacia fuera, tirando del globo ocular / <b>Frente:</b> De abajo hacia arriba.
3	Hydra Beauty Peeling químico	 Grande		1	1	5 min	Aplique el peeling químico: Aplique la solución particularmente donde se encuentre la célula muerta, puntos negros y en la frente, puede haber enrojecimiento (algunas veces se acompaña con sensación de hormigueo). Succión: Haga peeling utilizando sólo la función de succión. <b>Es obligatorio usar guantes en este paso.</b>
4	Hydra Beauty <b>Hydra Beauty S2</b>	 Chica	1	1	2	5 min	<b>Aplique la Solución 2 con Hydra Beauty</b> Limpie de forma intensa el área de células muertas y puntos negros en la Zona T (Nariz y frente).
5	Hydra Beauty <b>Solución de limpieza S4</b>	 Cubierta	Max	Max		2 min	Use la solución 4 para limpiar el equipo. (Este paso se realiza para limpiar los residuos de la solución 1 y 2 en la pieza de mano).
6	Frotar con agua					1 min	Frote y limpie la cara completa con agua mientras el equipo se limpia.

## Protocolo de Hydra Beauty II (Para equipos adquiridos a partir de 2018, con pantalla LCD)

- Asegúrese de probar la reacción a cada una de las soluciones a ambos lados del cuello, antes de iniciar el procedimiento.
- **Es muy importante que utilice guantes al menos durante los pasos 1 al 6, o preferentemente durante todo el procedimiento.**

7		Ampolleta de factores de crecimiento para arrugas	 Ampolleta				1 min	Use un tónico para limpiar la textura de la piel. Infiltre las ampollitas de factores de crecimiento en el siguiente orden: Labios, Globo ocular y Cejas.
8	Hydra Beauty	Limpieza de punta	 Grande		1		1 min	Agite y lave la punta grande en alguna solución desinfectante (Como Microdacyn) y finalmente límpiela utilizando la succión por 5 segundos.
9		<b>Electroporación</b> Solución hidratante, blanqueadora	 Pieza chica			2	10 min	Seleccione una solución blanqueadora e hidratante de acuerdo con el tipo de piel de su paciente y aplíquela uniformemente en toda la cara. Penetre la solución de forma profunda en la piel utilizando la pieza de mano de electroporación. <b>Piel sensible con acné:</b> Use Led azul. <b>Piel normal:</b> Use Led rojo.
10	Hydra Beauty	<b>Hydra Beauty S3</b>	 Grande	0.5	1	2	5 min	<b>Aplique la Solución 3 con Hydra Beauty</b> Aplique en toda la cara utilizando la técnica de <i>tapping</i> o pequeños toques. (Si utiliza la técnica de barrido puede irritar la piel al final del tratamiento).
11		<i>Lifting</i> con succión (Crema para blanqueado intensivo)	 Punta de succión		2-3	1	5 min	Después de haber aplicado la solución 3, haga un masaje en toda la cara con algún dispositivo de succión.
12		Crema BB (Blemish Balm o reparadora) y protector solar.					5 min	Aplique una crema BB y protector solar en toda la cara.
13	Hydra Beauty	<b>Hydra Beauty S4</b>	 Cubierta	Max	Max		2 min	Una vez que haya terminado el procedimiento, vuelva a realizar la auto limpieza de su equipo por dos minutos y después podrá guardarlo.
Opc.		Peeling de diamantes	 40		2	1	5 min	Haga un raspado de las células muertas con la punta de Peeling de diamantes.