

Noble) HAPE

Programa de entrenamiento



Programa de entrenamiento Noble SHAPE

Información general

Queremos agradecer el haber adquirido su nuevo equipo de Noble SHAPE, desarrollado para llevar a cabo el modelado corporal, incluido el tratamiento de celulitis, drenaje linfático, estimulación muscular, entre otros de forma segura, cómoda y efectiva.

El Noble SHAPE combina tres avanzadas tecnologías para realizar sus funciones:

- Electroestimulación de media frecuencia.
- Láser de bajo nivel.
- Radiofrecuencia.

Objetivos del programa

- Presentar un programa de entrenamiento teórico y práctico, para el uso y aprovechamiento adecuado de su equipo Noble SHAPE.
- Dar a conocer a los participantes la funciones, ventajas, alcances, limitaciones del equipo.

Conocimientos que obtendrán los participantes

- Será capaz de programar el equipo para los diferentes tratamientos y condiciones del paciente.
- Será capaz de analizar y valorar la condición actual de los probables pacientes, y si es que son candidatos para llevar a cabo alguno de los tratamientos con Noble SHAPE.
- Será capaz de informar al paciente sobre los resultados y alcances que pueda ofrecer al someterse a cualquiera de los tratamientos de Noble SHAPE.
- Conocerá los posibles riesgos y contraindicaciones en el tratamiento con Noble SHAPE.

Conocimientos previos requeridos

Para el máximo aprovechamiento de su entrenamiento, es necesario cuente con los siguientes conocimientos:

- Anatomía de la piel.
- Fisiología del tejido graso.
- Anatomía del sistema muscular.

Para el mejor aprovechamiento del entrenamiento

Considere que usted ha hecho una gran inversión para la adquisición de su nuevo equipo Noble SHAPE, además que su paciente espera que usted le ofrezca los mejores resultados posibles con el mismo, por lo cual es importante que tome en cuenta las siguientes consideraciones para el presente programa de entrenamiento.

- El entrenamiento se lleva a cabo durante un día, aproximadamente de cinco a seis horas, por lo que es recomendable durante ese día el personal que vaya a ser entrenado no tenga citas durante ese tiempo.
- Parte del éxito del entrenamiento es que el personal que estará encargado del uso del equipo haya analizado detenidamente la información en el manual de usuario y todos los documentos entregados previos a la capacitación.
- Es muy importante contar con los pacientes requeridos para la práctica, de otra manera no será posible completar los conocimientos obtenidos en la sesión teórica.

Sesión teórica

10 minutos	Aclaración de preguntas sobre el manual de usuario y protocolo.
25 minutos	Teoría de acción de Noble SHAPE. <ul style="list-style-type: none">• Sinergia de tecnologías en Noble SHAPE.• Estructura de los pads.• Indicaciones y contraindicaciones.• Selección de pacientes.• Preparación del paciente.• Cuidados de pacientes post tratamiento.• Seguimiento del paciente. <ul style="list-style-type: none">• Atención a preguntas.

Sesión práctica

Es muy importante que el paciente haya asistido a una valoración previa y llenado su consentimiento informado. Las siguientes se consideran contraindicaciones para el tratamiento, si el candidato presente alguna de las siguientes condiciones, no podrá ser tratado.

- Tumor maligno.
- Niños.
- Mujeres embarazadas o lactantes.
- Herpes.
- Epiléptico, infección y erupción cutánea.
- Respuesta inflamatoria.
- Enfermedad hemorrágica (p. Ej., Hemofilia).
- Enfermedad cardiovascular.
- Nefritis.
- Usuarios de marcapasos.
- Soporte de metal insultado.
- Disarteriotonía.
- Diabetes.
- Dermatopatía.
- Tomar medicamentos anticoagulantes.
- Enfermedad autoinmune.
- Parálisis facial.
- Lupus.
- Paciente febril (más de 38°C).
- Periodo menstrual.
- Relleno en el área a tratar.
- Dermatopatía crónica que afecta el cuerpo tópico o completo.
- Piel queuloide.
- Terapia de descarga eléctrica débil.
- Otra enfermedad extraordinaria.

No utilice los siguientes instrumentos con el equipo.

- Instrumentos médicos electrónicos implantables (marcapasos).
- Sistema de soporte vital (corazón o pulmón artificial).
- Instrumentos médicos electrónicos portátiles (electrocardiógrafo).
- No conecte el equipo a los electroestimuladores.

Desarrollo: Se llevará a cabo un tratamiento de muestra por la persona encargada del entrenamiento. El resto de los tratamientos serán realizados por los asistentes, supervisados por la persona encargada.

20 minutos	<p>Introducción del equipo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pantallas. ○ Pieza de mano (Pads) y sus soportes. ○ Interruptor de llave para encendido. • Conexión y desconexión de los pads. • Conexión y uso de botón de paro de emergencia. • El interlock. • Cómo encender y apagar su equipo. • Uso de la interfaz de usuario: <ul style="list-style-type: none"> ○ Agrupación y programación de pads en pares. ○ Botón <i>Mode</i> de Modo de Trabajo. ○ Botón <i>CH</i> para seleccionar canal a configurar. ○ Botón <i>Level</i> para ajustar los valores. ○ Información en pantalla sobre estado de trabajo, canal, tamaño de pads conectados. ○ Configuración de láser. ○ Selección del programa de baja frecuencia y su nivel. ○ Tiempo de operación. ○ Botón de INICIO / DETENER.
15 minutos	<p>Preparación del paciente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis de el tratamiento que el paciente desea. • Determinando cuantos y cuales pads serán utilizados. • Eligiendo programa a usar. • Aplicación de gel. • Colocación de pads. <p>Se requiere alguno de los pacientes que vayan a ser tratados.</p>
45 minutos	<p>Tratamiento 1: Abdomen, Muslo, Pantorrilla o Brazo. <i>Paciente necesario: Paciente mujer u hombre que desee cualquiera de los siguientes tratamientos: Celulitis, Lipolisis, Modelado Corporal, Revitalizador, Relajación o Drenaje Linfático.</i></p>
15 minutos	<p>Limpieza de los pads después del tratamiento</p>
45 minutos	<p>Tratamiento 2: Abdomen, Muslo, Pantorrilla o Brazo. <i>Paciente necesario: Paciente mujer u hombre que desee cualquiera de los siguientes tratamientos: Celulitis, Lipolisis, Modelado Corporal, Revitalizador, Relajación o Drenaje Linfático.</i></p>
45 minutos	<p>Tratamiento 3: Abdomen, Muslo, Pantorrilla o Brazo. <i>Paciente necesario: Paciente mujer u hombre que desee cualquiera de los siguientes tratamientos: Celulitis, Lipolisis, Modelado Corporal, Revitalizador, Relajación o Drenaje Linfático.</i></p>

45 minutos	<p>Tratamiento 4: Abdomen, Muslo, Pantorrilla o Brazo. <i>Paciente necesario: Paciente mujer u hombre que desee cualquiera de los siguientes tratamientos: Celulitis, Lipolisis, Modelado Corporal, Revitalizador, Relajación o Drenaje Linfático.</i></p>
45 minutos	<p>Tratamiento 5: Abdomen, Muslo, Pantorrilla o Brazo. <i>Paciente necesario: Paciente mujer u hombre que desee cualquiera de los siguientes tratamientos: Celulitis, Lipolisis, Modelado Corporal, Revitalizador, Relajación o Drenaje Linfático.</i></p>
45 minutos	<p>Tratamiento 6: Abdomen, Muslo, Pantorrilla o Brazo. <i>Paciente necesario: Paciente mujer u hombre que desee cualquiera de los siguientes tratamientos: Celulitis, Lipolisis, Modelado Corporal, Revitalizador, Relajación o Drenaje Linfático.</i></p>
20 minutos	Atención a preguntas

Requisitos para la capacitación

Requisitos para la sesión teórica

Es recomendable contar con un área cómoda para llevar a cabo la sesión teórica. Para tal efecto tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Deberá de ser lo suficientemente amplia para alojar todas las personas que tomaran la capacitación.
- Contar con iluminación adecuada.

Requisitos para la sesión práctica

Comúnmente podrá utilizar un consultorio estándar o cubículo destinado para este tipo de procedimientos. Te pedimos de favor que cuentes con las siguientes consideraciones.

- Cubículo amplio y cómodo para los tratamientos.
- Iluminación agradable.
- Contar con camilla reclinable para tratamientos corporales.
- **Todos los pacientes deberán saber que el tratamiento que se les realizará será con el fin de entrenamiento.**

Material necesario

El siguiente material es necesario para llevar a cabo los tratamientos. Para la capacitación, la persona encargada llevará lo necesario para el correcto desarrollo del entrenamiento.

- Microdacyn o algún tipo de antiséptico.
- Gel conductor.
- Guantes (no estéril).
- Cubre bocas.
- Abate lenguas.

El siguiente material, deberá de ser proporcionado por el médico:

- Agua termal.
- Crema de aloe vera.

En medida que cumpla con los requisitos antes señalados, el desarrollo del entrenamiento se llevara a cabo de una manera coordinada y adecuada a los objetivos del programa.