
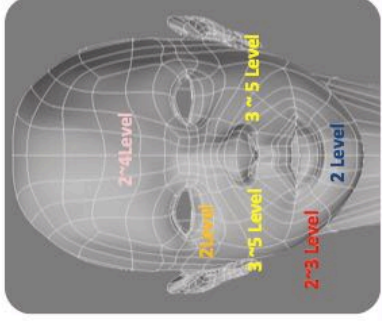


Niveles de energía

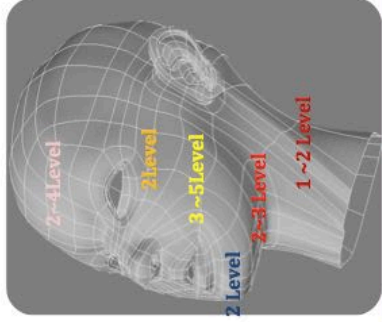

Los niveles que aquí se muestran son propuestas en base a los resultados con pacientes, sin embargo, usted puede ajustar el nivel de energía:

- Si el paciente siente dolor intolerable, disminuya el nivel y haga otra prueba.
- Si el paciente siente calor moderado, puede incrementar el nivel.

Jeisys recomienda realizar tratamientos cómodos aunque esto requiera tener que realizar más sesiones.

Área	Nivel	Comentarios
Frente	2 a 4	Utilice energía baja en los bordes de la frente y energía alta en el centro.
Peri-ocular	2	Es un área muy sensible por lo que se recomiendan niveles de energía bajos.
Mejillas	3 a 5	
Línea mandibular	2 a 3	
Cuello	1 a 2	No realice el tratamiento sobre el hueso hioides, sólo alrededor.

Guía rápida GFR

	<p>Paso 1 – Marcación Marque la zona con el papel cuadriculado. Para detalles de cómo realizarlo, revise su guía de tratamientos.</p> <p>* Puede realizar este paso desde un principio para toda la cara.</p>
	<p>Paso 2 – Aplicación de fluido Aplique suficiente fluido de acoplamiento en el área a tratar para facilitar la conducción de la RF y el deslizamiento de la pieza de mano.</p> <p>* Realice este paso en la zona que vaya a tratar, si aplica el fluido en toda la cara de una sola vez, este puede secarse.</p>
	<p>Paso 3 – Pre-calentamiento Con movimientos circulares rápidos y continuos, mientras emite energía, realice 3 pasadas en la zona que vaya a tratar.</p> <p>* Haga este paso por zona para conservar el calentamiento inicial.</p>
	<p>Paso 4 – Estampado por zona Realice disparos en el área a tratar, uno al lado de otro, sin movimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 pases en cada zona de forma estándar. • Hasta 4 pases en zonas donde desee mayor efecto, como mandibular o periorcular. <p>Ajuste la energía a la tolerancia de su paciente.</p>